



medi

Lumbamed® basic




Lumbalorthese
Lumbar support
Ceinture des soutien lombaire
Soporte lumbar

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкція по використанню. Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató. Uputstvo za upotrebu. Інструкція з використання. Navodila za uporabo. 使用说明书.

medi. I feel better.



1

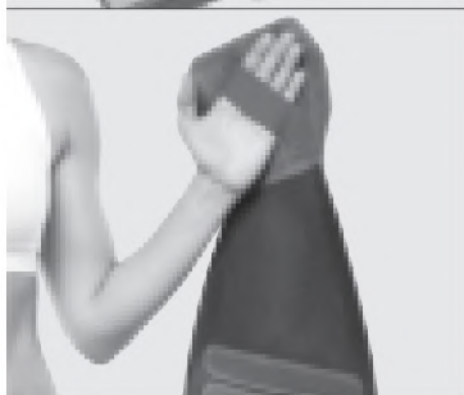

2



3



4



5



6

Lumbamed® basic

Назначение

Поясничный бандаж Lumbamed basic может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

Показания

- Боли в пояснице (люмбаго), в том числе при поражении межпозвонковых суставов.
- Нарушение тонуса постуральных мышц поясничной области.
- Повреждение связок поясничной области.
- Синдром оперированного диска.
- Незначительная гипермобильность межпозвонковых суставов поясничной области.
- Синдром крестцово-подвздошного сочленения.

Противопоказания

Необходимо обязательно обсудить с врачом возможность использования бандажа в следующих случаях:

- Наличие каких-либо заболеваний или признаков воспаления (повышенная температура, припухлость, покраснение) кожи поясничной области.
- Нарушение чувствительности и/или кровоснабжения нижних конечностей.
- Нарушение лимфатического оттока от нижних конечностей и/или органов таза.
- Наличие опухоли мягких тканей в области, соприкасающейся с бандажом.
- Необходимость/желание одновременного использования

нескольких компрессионных изделий (бандажи, компрессионный трикотаж и т.п.).

Принцип действия

Обратите внимание: первый раз надевать изделие следует под наблюдением квалифицированного специалиста, который прошел соответствующее обучение. Поясничный бандаж Lumbamed basic стабилизирует поясничный отдел позвоночника. Это означает, что при его использовании Вы сможете сгибаться и разгибаться в пояснице, но только в пределах физиологической амплитуды. Таким образом, бандаж исключает чрезмерное смещение позвонков относительно друг друга (только при легкой и умеренной степенях гипермобильности позвонков!) и препятствует (дальнейшему) повреждению суставных капсул и межсуставных дисков в результате такого смещения. Кроме того, бандаж Lumbamed basic обладает компрессионными свойствами. Это позволяет улучшить кровоснабжение, как в поясничной области, так и в области брюшной стенки.

Бандаж Lumbamed basic может использоваться для профилактики повреждения межпозвонковых суставов и связок при физической нагрузке, а также для профилактики и лечения перечисленных ниже заболеваний и состояний.

Рекомендации по применению

Для максимального лечебного эффекта Lumbamed basic следует носить регулярно. При отсутствии конкретных рекомендаций врача, бандаж можно носить весь день. Если при использовании изделия у Вас возникли боль или неприятные ощущения,

пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача. Бандаж можно использовать, находясь в соленой или пресной воде, после чего его следует тщательно прополоскать в чистой воде и высушить (см. Рекомендации по уходу).

Надевание/снятие

- На правой стороне застежки изнутри на этикетке содержится указание по правильному расположению ортеза (рис. 1).
- Сначала проденьте руку в предназначенную для этого внутреннюю петлю на левой стороне застежки. Оберните бандаж вокруг тела и проденьте другую руку в предназначенную для этого внешнюю петлю с правой стороны (рис. 2 и 3).
- Потяните обе стороны с застежками по направлению друг к другу и надежно застегните их по возможности по центру. Бандаж расположен правильно, если нижний край застежки находится непосредственно над лобковой костью (рис. 4 и 5).
- Чтобы снова расстегнуть бандаж, воспользуйтесь маленькой петелькой для пальца на краю правой стороны застежки (рис. 6).

Максимальная воздухопроницаемость трикотажа Clima Comfort достигается при ношении бандажа непосредственно на тело.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните бандаж. Масла, лосьоны и мази могут повредить материал и привести к снижению эффекта Clima-Comfort.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при

температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.

- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Состав

Полиамид, Полиэстер, эластан, вискоза

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!