

energy line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

LUMBOSTAT
КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

DBS-4000(M)

DBS-4000(W)

WWW.ORLETT.RU

Корсет Orlett Energy line изготовлен из эластичного материала специальной вязки, обеспечивающего повышенную влаго- и воздухопроницаемость. Технология вязки корсета позволяет достичь плотного анатомического прилегания к суставам и компрессии мягких тканей, способствуя активации кровообращения, снижению отеков и уменьшению болевого синдрома.

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Корсеты Orlett Energy line, арт. DBS-4000(W) и арт. DBS-4000(M), обеспечивают среднюю степень фиксации поясничного отдела позвоночника, стабилизацию и разгрузку связочно-суставного аппарата позвонков.

Специальная съемная массажная подушка в области поясницы выполняет постоянный лечебный массаж паравертебральных мышц, нервных окончаний и рефлексогенных зон. Массаж улучшает кровообращение в мышцах, стимулирует проприоцепцию и повышает устойчивость к нагрузкам.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- болевой синдром в пояснице при радикулите и люмбаго;
- профилактика обострений при спондилезе и спондилоартрозе, остеохондрозе поясничного отдела позвоночника;
- воспалительные заболевания мышц и связок поясничной области;
- нарушения мышечного тонуса в поясничном отделе;
- реабилитация после операций на межпозвонковых дисках;
- профилактика травм и обострений заболеваний при подъеме тяжестей и других нагрузках на поясницу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность;
- неврастимые грыжи брюшной стенки;
- диафрагмальные грыжи;
- синдром портальной гипертензии;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.



Людам с особо чувствительной кожей следует надевать корсет на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование корсета и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего использования.

КОНСТРУКЦИЯ

Корсет состоит из следующих элементов:

1. Пояс корсета.
2. Передние панели корсета.
3. Массажная подушка.

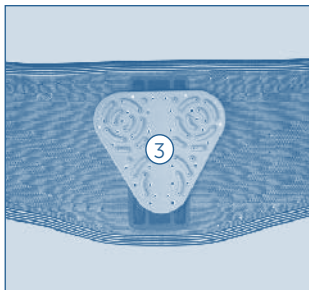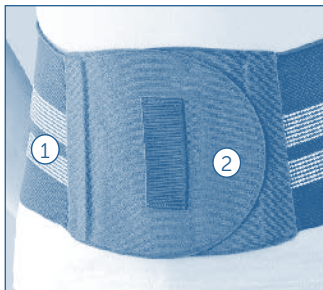

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Корсет рекомендуется надевать в положении лежа на спине.

Корсет надеть на спину таким образом, чтобы массажная подушка расположилась в пояснично-крестцовой области по центру. Для удобства надевания на панелях с застежками-липучками велкро предусмотрены ручки. Съемную массажную подушку закрепить на корсете с помощью застежки-липучки велкро. При желании или при необходимости массажную подушку можно снять.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать корсет слишком сильно, во избежание нарушений дыхания.


РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.
Изделие предназначено для многократного личного использования.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЖИМ

При статических нагрузках на поясницу.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

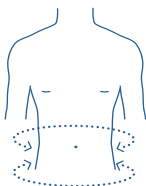

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать модель корсета Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	66-77
M	77-90
L	90-104
XL	104-118
XXL	более 118

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой отстегнуть массажную подушку. Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. После высыхания пристегнуть массажную подушку.



СОСТАВ

40% полиамид, 20% латекс, 18% термопластический эластомер, 8% полиэстер, 5% эластан, 7% сталь, 2% поливинилхлорид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. DBS-4000(W) или арт. DBS-4000(M), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

