



## Инструкция по применению ортопедических изделий

Medical Line



### Ортезы и бандажи малых размеров

#### Ортез на коленный сустав RKN-203(P), разъемный

##### Свойства товара (оказываемые эффекты):

Ортез (тутор) Orlett на коленный сустав арт. RKN-203(P), разъемный, предназначен для иммобилизации коленного сустава, обеспечивает фиксацию и боковую стабилизацию коленного сустава. Ношение ортеза способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Разъемная конструкция ортеза облегчает его надевание при сильном отеке сустава, поверх бинтовых повязок и после проведения физиотерапевтических процедур.

##### Показания к применению:

- нестабильность коленного сустава;
- травмы коленной чашечки (надколенника);
- стабилизация коленного сустава после снятия гипсовых повязок;
- состояние после травм и операций на коленном суставе;
- реабилитация после травм и восстановительных операций на менисках, связочном аппарате коленного сустава.

##### Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

##### Противопоказания:

- острые гнойные воспалительные заболевания;
- индивидуальная непереносимость материалов.

##### Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Заболевания кожи (в области применения ортеза). При возникновении физического дискомфорта, раздражения следует немедленно проконсультироваться с лечащим врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

#### Конструкция ортеза Orlett, арт. RKN-203(P):

Ортез (тутор) Orlett на коленный сустав, разъемный, с металлическими шинами, арт. RKN-203(P) выполнен из современного инновационного композитного материала Soft touch. Soft touch — прочный упругий материал с мягкой основой, обеспечивающий воздухопроницаемость. В конструкции ортеза (тутора) предусмотрена возможность замены металлических шин на спиральные ребра жесткости для изменения степени фиксации на реабилитационном этапе лечения.

На рис. 11 отмечены следующие элементы конструкции:

1. Муфта.
2. Четыре моделируемые металлические шины.
3. Фиксирующие ремни с застежками-липучками «Велкро».
4. Сменные спиральные ребра жесткости (2 шт.) прилагаются в комплекте для изменения степени фиксации на реабилитационном этапе лечения.



рис. 11

#### ВНИМАНИЕ!

Выбор шины или спиральных ребер жесткости определяется рекомендацией лечащего врача. В случае необходимости металлические шины могут быть дополнительно смоделированы лечащим врачом.

#### Способ подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность середины коленного сустава (рис. 12). Согласно полученным результатам подобрать ортез по таблице подбора размеров.

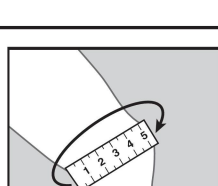


рис. 12

#### Порядок надевания:

Ортез Orlett, арт. RKN-203(P) надевается непосредственно на коленный сустав. Перед надеванием расстегнуть утягивающие ремни. При надевании необходимо совместить отверстие на передней поверхности ортеза с коленной чашечкой. Зафиксировать ортез утягивающими ремнями с застежками-липучками «Велкро»: сначала нижнюю манжету, а затем верхнюю и отрегулировать давление на мягкие ткани.

#### ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать утягивающие ремни слишком сильно во избежание нарушения кровообращения.

#### Таблица подбора размеров:

Ортез на коленный сустав Orlett, арт. RKN-203(P)	
Размер	Окружность середины коленного сустава (см)
S	20-22
M	23-25
L	26-29
XL	30-33
XXL	34-39

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

#### Состав изделия:

30% полиамид, 22% полиэстер, 15% полиуретан, 5% эластан, 15% алюминий, 5% сталь, 8% полиэтилен.


#### Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. RKN-203(P), спиральные ребра жесткости, инструкция по применению.

#### Правила ухода за бандажами и ортезами:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлоросодержащие средства. Глажение запрещается. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, ребрами жесткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.

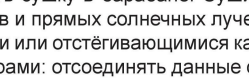

#### Условия хранения:

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

#### Условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

#### Срок службы:

Срок службы не ограничен.

Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

#### Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи изделия при соблюдении инструкции.

#### Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.