

Подушка с эффектом памяти и выемкой под плечо LumF-503. 35x52 см. Валики 9 и 14 см

Особенности:

- размер 35x52 см
- высота валиков 9 и 14 см
- выемка под плечо создает комфортное положение тела во время сна
- эффект памяти «Memory Foam»
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных пристрастий

Показания к применению:

- боли в шейном и других отделах позвоночника
- профилактика заболеваний позвоночника
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материала
- воспалительные заболевания кожи
- угревая сыпь на плечах, вызванная нарушением обмена веществ

Рекомендации:

Сухая чистка. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Беречь от воздействия повышенной влажности. После пребывания на холоде полностью восстанавливает свои свойства.

Инструкция по применению:

- расположить подушку валиком под шейный отдел

Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

Состав:

- наполнитель - полиуретан 100%
- наволочка - поликоттон 100%

Гарантии:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

Гарантийные обязательства:

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки

- во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика
- в период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель
- вспененный полиуретан — дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении и использовании. В случае выявления запаха, необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее
- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Изменение цвета вспененного полиуретана не влияет на качество и функциональные особенности материала.
- для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать
- не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0° С

Рекомендации по уходу

