

Шина нижней конечности (деротационный ортез) на голеностоп FS 2952, Fosta.

Описание действия:

- обеспечивает фиксацию голеностопного сустава и нижней трети голени во фронтальной плоскости,
- обеспечивает фиксацию нижней конечности с корректировкой внутренней и наружной ротации,
- используется для реабилитации лежачих больных,
- ограничивает ротацию в тазобедренном суставе,
- применяется при переломах шейки бедра, подвывихах, после эндопротезирования.

Показания к применению:

- переломы шейки и вертельной области бедра,
- период реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава,
- парезы и параличи нижних конечностей различного генеза,
- период реабилитации после ОНМК (инсультов) и очаговых поражений нервов нижних конечностей.

Результат применения:

- фиксация и стабилизация нижней конечности,
- фиксация стопы в функционально выгодном положении.

Состав:

- хлопок- 36%
- эластан- 20%
- полиамид- 44%

Размер	S	M	L
Размер обуви	34-38	39-42	43-45

Порядок надевания:

- надевается непосредственно на тело,
- в случае местных заболеваний кожи по рекомендации врача может надеваться на хлопчатобумажный носок.

Режим и сроки ношения:

- определяет лечащий врач.

Рекомендации по уходу:

- стирать изделие в теплой воде (35 °C),
- использовать высококачественные моющие средства,
- ручная стирка, не стирать в стиральной машине,
- не сушить в барабане,
- не отбеливать
- не гладить,
- сушить в расправленном виде вдалеке от нагревательных приборов,
- сухая чистка запрещена.