

Россия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, оказанное продукции Orliman. Вы приобрели изделие высокого качества и большого медицинского значения. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, свяжитесь с Вашим лечащим врачом, ортопедом или обратитесь в наш отдел по работе с клиентами. Компания Orliman ценит Ваш выбор и желает Вам скорейшего выздоровления!

ПОЛОЖЕНИЕ

Данные изделия соответствуют требованиям Директивы Евросоюза 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Для минимизации всех возможных рисков был проведен анализ (UNE-EN ISO 14971). Все необходимые испытания были проведены в соответствии с Европейским положением по протезам и ортезам (UNE-EN ISO 22523).

ПОКАЗАНИЯ

Защита и контроль после травмы или хирургического вмешательства, растяжения или повреждения связок, в качестве метода замещения пластыря при лечении язвенных или изъязвленных состояний поверхности подошвы ступни. Острые подошвенные фасциты, а также в случаях постоянного распределения веса тела на подошвенную область и иммобилизацию сочленений большой берцовой кости.

ПОДГОТОВКА ОРТЕЗА

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРЕГУЛИРОВАНО ТЕХНИКОМ, ЛИБО.

Для достижения большего терапевтического результата при различных отклонениях, а также для продления срока службы и эффективности изделия, необходимо подобрать правильный размер, подходящий пациенту (в комплекте прилагается таблица размеров с эквивалентом в сантиметрах). Повышенная компрессия может вызвать переносимость, следовательно, рекомендуется подобрать оптимальные для Вас регулировки.

A - Для размещения изделия надо учитывать следующие аспекты:

Рекомендуется надевать ортез «walker» находясь в сидячем положении и положив ногу на ногу. На ногу следует надеть носок, желательно из хлопка.

1-Расстегните застежки-липучки «Велькро», чтобы отделить жесткую конструкцию от мягкого чехла, надеваемого на ногу. Наденьте мягкий чехол на ногу пациента, закрепив его с помощью системы застежек-липучек «Велькро». Разместите подушечку, защищающую пальцы.

2-После этого введите ногу в ортез. Убедитесь, что подошва ноги достигла опорной поверхности ортеза. (Если это сочлененная модель, то убедитесь, что среднебоковые пластины располагаются параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии от линии нагрузки ноги и голеностопного сустава). Прикрепите жесткую структуру (или среднебоковые пластины, в случае сочлененной модели ортеза) к мягкому чехлу с помощью застежек-липучек «Велькро», которые расположены внутри конструкции.

3-В заключение закройте и отрегулируйте ортез с помощью ремней с «Велькро» (если это сочлененная модель, то перед регулировкой ремней следует разместить пластины для защиты большеберцовой кости и икры).

B - Инструкции для регулировки сочленения (EST-083 и EST-086):

Для правильного функционирования сочленения рекомендуется не градуировать оба движения сгибания и разгибания одновременно.

1-Разблокируйте регулятор белого цвета путем сдвига детали оранжевого цвета.

2-Затем нажмите белую деталь, одновременно сдвигая ее на нужный уровень. Должен раздаваться щелчок.

3-Снова сдвиньте оранжевую деталь под белый регулятор для блокировки. Это поможет надежно зафиксировать выбранное положение.

4-Повторите этот процесс с другой стороны сочленения. Чтобы предотвратить повреждение механических сочленений и возникновение осложнений, следует установить оба регулятора сгибания или разгибания в одном и том же положении.

(Для блокировки пластин под фиксированным углом в 90° следует установить регуляторы сгибания и разгибания на 0°).

C - Инструкции для применения насоса для накачивания (EST-083 и EST-089):

1-Для накачивания поверните клапан в направлении INFLATE (по часовой стрелке). Клапан следует сжимать с силой, чтобы избежать утечки воздуха.

2-Нажмите несколько раз круглую оранжевую деталь, чтобы достичь нужного давления.

3-Для выпуска воздуха поверните клапан в направлении DEFLATE (против часовой стрелки) до удобного положения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал, из которого изготовлено изделие, является легко воспламеняющимся. Не подвергайте изделие ситуациям, когда оно может воспламениться. В случае если это произошло, немедленно снимите его и примите все необходимые меры, чтобы потушить пламя. Используемые для изготовления изделия материалы гипоаллергенны, тем не менее, нельзя на 100% гарантировать, что в определенных случаях они не вызовут аллергическую реакцию. В таком случае, снимите изделие и свяжитесь с врачом, который его прописал.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


Данные изделия предназначены только для тех, кому они были прописаны по медицинским показаниям. Личности, не имеющие таковых предписаний, не должны ими пользоваться. Когда изделие не используется, храните его в оригинальной упаковке. При утилизации упаковки и самого изделия строго следуйте правовым нормам Вашей страны. Использование ортеза обуславливается рекомендациями врача, назначившего его, следовательно, он не должен использоваться для каких-либо целей, кроме предписанных. Для обеспечения гарантийных условий учреждение, выдающее протезы должно соблюдать все предписания настоящей инструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Материалы, использованные в производстве, были протестированы, одобрены и отвечают всем европейским требованиям качества. Все изделия производятся из материалов высокого качества и предлагают идеальный комфорт и качество использования. Все изделия обеспечивают поддержку, прочность и компрессию для оптимального лечения тех патологий, для которых они были разработаны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И УХОДУ

Застегните застежки «липучки» (если такие имеются), чистите вручную влажной тканью с нейтральным мылом. Для сушки ортеза используйте сухое полотенце, чтобы впитать большую часть влаги и оставьте сушиться при комнатной температуре. Нельзя вешать, гладить и подвергать воздействию прямых источников тепла, таких как плиты, обогреватели, радиаторы, солнечные лучи и т.д. Во время использования или чистки не применяйте спиртосодержащие жидкости, мази и растворители. Если ортез тщательно не высушить, то остатки моющих средств могут раздражать кожу и портить изделие.

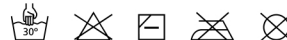

ГАРАНТИИ

ORLIMAN, S.L.U. дает гарантию на все изделия, при условии, что их изначальная конфигурация не была подвергнута внешнему воздействию или каким-либо изменениям. Компания не дает гарантию на изделия, которые были изменены вследствие неправильного использования, поломки или дефектов любого характера. При обнаружении дефектов или anomalies любого характера, пожалуйста, свяжитесь с компанией, в которой Вы приобрели изделие, с целью обмена. Мы, в Orliman, ценим доверие, оказанное нашей продукцией и желаем Вам скорейшего выздоровления.