

Ортопедический корсет грудопоясничный Т-1553

Описание:

- изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного полотна
- снабжен 4-мя моделируемыми металлическим ребрами жесткости
- имеет тройную дополнительную стяжку для регулировки фиксирующих возможностей корсета
- ребра жесткости изгибаются врачом индивидуально согласно физиологическим изгибам позвоночника и анатомическим особенностям пациента
- эластичный материал корсета, 4 моделируемые ребра жесткости и тройная дополнительная стяжка позволяют создать регулируемое давление, что посредством разгрузки мышц поясницы и сжатия брюшной полости приводит к купированию болевого синдрома
- высота корсета 35 см

Функции ортопедического грудопоясничного корсета:

- сильная фиксация и стабилизация грудопоясничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника
- разгрузка мышц спины и опорных сегментов позвоночника
- противоболевой эффект

Показания к применению ортопедического корсета:

- остеохондроз, остеоартроз, спондилез
- компенсация опорной функции после операций и травм в грудопоясничной области
- радикулиты, миозиты, перенапряжения мышц поясницы
- спондилолистез, явления нестабильности в грудопоясничном отделе позвоночника
- межпозвонковые грыжи, в том числе осложненные неврологическими проявлениями
- профилактика травм и заболеваний поясничного отдела позвоночника при физических нагрузках
- нарушение структуры тел позвонков в результате опухолевого, туберкулезного и других процессов

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника
- наличие в области применения ортопедического корсета контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

Применять ортопедический грудопоясничный корсет по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению ортопедического корсета:

- надеть корсет на нижнее белье лежа на спине
- ребра жесткости должны располагаться посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба
- зафиксировать застежку корсета на животе
- отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительной стяжки
- степень фиксации и моделирование ребер жесткости осуществляются врачом
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом

При возникновении вопросов по применению ортопедического грудного корсета обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования ортопедического корсета появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегнуть все застёжки
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать корсет
- не тереть и не выжимать изделие
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав ортопедического корсета:

- полиамид – 45%
- эластан – 20%
- пенополиуретан – 20%
- полиэстер – 15%
- ребра: металл – 1 мм

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.