



**ORTMANN®**

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**БАНДАЖ  
(КОРРЕГИРУЮЩИЙ)  
НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ СТОПЫ**

**DANS**

Арт. F-00020-01; 02; 03



Надеть изделие так, как показано на фотографии.

- НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- консервативное лечение Hallux valgus (вальгусная деформация большого (первого) пальца стопы);
  - фиксация в правильном положении после оперативного лечения.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Бандажи Dans следует надевать только на время сна и снимать перед подъемом с постели. После операции следует применять бандажи Dans после заживления коник. При наличии диабета перед применением проконсультируйтесь у врача. Натяжение бандажа постепенно усиливают до полного излечения (исправления деформации пальца).

**ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:**

- применяют при начальной и средней степени нефиксированного Hallux valgus (отклонение первого пальца внаружи) для того, чтобы вернуть большие пальцы стопы в нормальное положение;
- применение бандажей Dans после операции по поводу Hallux valgus повышает эффективность реабилитации;
- приостанавливают развитие деформации суставов большого пальца;
- нормализуют тонус связок и мышц стопы.

**ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

не использовать при открытых и мокрых ранах.

**СОСТАВ:**

пластиковая рама с пенополиуретановыми накладками и застежками «Велкро».

**УХОД:**

бандажи периодически моют теплой водой с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

60 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

2 шт. в упаковке.

**РАЗМЕР:**

S (34-36), M (37-40), L (41-44).

## КОНСТРУКЦИЯ НОЧНОГО БАНДАЖА DANS:

1. Упор для большого пальца
2. Накладка на сустав большого пальца
3. «Рожки» бандаж
4. Лента застежки-липучки

### ВНИМАНИЕ!

Перед использованием определите правое и левое изделие (см. рис. 2)

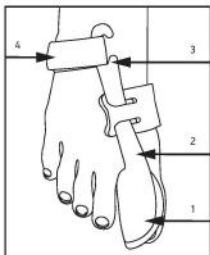


Рис. 1



Рис. 2

### СПОСОБ НАДЕВАНИЯ:

Расстелите ленту застежки-липучки (4). Возьмите бандаж в руку, так чтобы «рожки» бандаж (3) были направлены в сторону пятки. Аккуратно наденьте бандаж на большой палец так, чтобы упор для большого пальца (1) находился между первым и вторым пальцами ноги.

Плотно примите «рожки» бандаж (3) к подошвенной и тыльной поверхности стопы.

Упор (1) должен плотно прилегать к наружной поверхности стопы.

Упор (1) должен плотно прилегать к наружной поверхности большого пальца (рис. 3).

Оберните ленту застежки-липучки (4) вокруг наружного края стопы и зацепите ее за прорезь «рожки» на подошвенной поверхности стопы (рис. 4).

Обратите внимание, чтобы при этом сам бандаж не смещался.

Протяните ленту застежки-липучки (4) к наружному краю стопы и застегните бандаж (рис. 5).

Напряжение ленты застежки-липучки регулирует степень отведения большого пальца. После застегивания липучки проверьте правильность положения бандаж (рис. 6).



Рис. 3

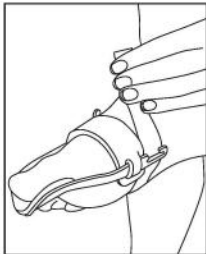


Рис. 4

#### ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размерный ряд	S	M	L
Размер обуви	34-36	37-40	41-44

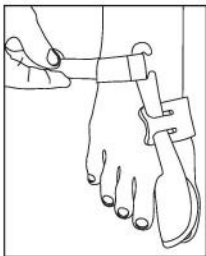


Рис. 5

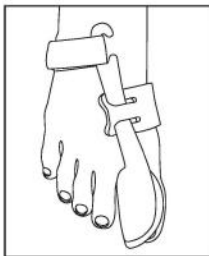


Рис. 6