

Бандаж до- и послеродовой ДР-02

Особенности:

- высота 15 см
- воздухо- и влагопроницаемая ткань
- хлопковые панели под живот
- дополнительные поддерживающие стяжки
- 2 ребра жесткости
- идеально "сидится" по фигуре, не заметен под одеждой и обеспечивает оптимальную степень поддержки
- съемный аппликатор (пелот) для использования в послеродовом периоде
- цвет: бежевый

Показания к применению:

- эластичная поддержка живота
- обеспечение нормального положения плода и оптимальных условий для его развития
- предотвращение образования растяжек, перерастяжения и ослабления брюшной стенки
- стабилизация положения внутренних органов и матки
- разгрузка пояснично - крестцового отдела позвоночника и соединений костей таза
- существенно сокращает сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов
- послеродовой период
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания:

- абсолютные противопоказания:
 - неправильное положение плода
- относительные противопоказания, требуют консультации врача:
 - открытые раны, ожоги кожных покровов в области применения бандажа
 - паховые и пупочные грыжи
 - аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие
- ограничения ношения дородового бандажа:
 - кожные заболевания

Рекомендации:

ручная стирка при t 30°C, стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку



Размер	S	M	L	XL	XXL
	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140

Инструкция по применению:

- без ограничения по времени использования
- надевать лежа на нижнее белье

Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

Состав:

- хлопок - 30%
- полиамид - 58%
- эластан - 12%

Гарантии:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

Рекомендации по уходу

