



**ORTMANN®**

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

**ДОКТОР ВАШИХ НОГ**

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

## **ORTMANN – ДОКТОР ВАШИХ НОГ!**

Предлагает Вам комплексные профессиональные решения проблем стопы. ORTMANN – немецкий ортопедический бренд, специализирующийся в области лечения и профилактики заболеваний стопы.

ORTMANN представляет широкий спектр моделей ортопедической обуви и стелек для взрослых и детей, а также ортопедические корректирующие приспособления. Изделия ORTMANN идеально сочетаются друг с другом и могут применяться при комплексной терапии.

ORTMANN предлагает продукцию для всех поколений: с первых шагов до пожилого возраста. ORTMANN это бренд для всей семьи.

# SolaPro **FAVORA** **ORTHO SYSTEM**

КАРКАСНЫЕ СТЕЛЬКИ  
С МЕТАТАРЗАЛЬНЫМ  
ПЕЛОТОМ

Арт. AX1113

## НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ С УЧЕТОМ ПОДБОРА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВЫСОТЫ КАРКАСА СТЕЛЕК:

- продольное нефиксированное плоскостопие I-IV степени;
- комбинированное плоскостопие;
- распластанность переднего отдела;
- полая стопа;
- беременность;
- длительное пребывание на ногах;
- тяжелые физические нагрузки;
- ХВН и варикозное расширение вен нижних конечностей;
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей.

## ТИП ОБУВИ:

для всех типов закрытой обуви с каблуком до 4 см.

## ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- поддерживают поперечный и продольные своды стопы;
- перераспределяют нагрузку по всей площади подошвы стопы;
- повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
- снимают ударную нагрузку с пятки;
- устраняют запах в обуви;
- уменьшают развитие бактерий и грибов;
- улучшают кровообращение стоп;
- предупреждают усталость стоп;
- предупреждают развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
- уменьшают нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
- улучшают общее самочувствие.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

необходимость индивидуального ортезирования стопы.

**СОСТАВ:** натуральная кожа, вспененный полимер, активированный уголь, пенополиуретан, вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

**РАЗМЕР:** 35-46.

**ВЫСОТА КАРКАСА:** HIGH, MEDIUM, LOW (подбирается в соответствии с индивидуальными особенностями стопы).

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Ортопедические стельки ORTMANN рекомендуется носить в повседневной и спортивной обуви. Режим ношения – ежедневно или по назначению специалиста. Длина и ширина стельки должна соответствовать размеру стопы и плотно прилегать к внутренней части обуви.

Некоторые модели стелек и полустелек могут комплектоваться отдельными клеевыми фиксаторами в индивидуальной упаковке для самостоятельного наклеивания на подошвенную сторону стелек в области пяточного амортизатора. Для максимально надежного крепления клеевого фиксатора поверхность в месте контакта должна быть совершенно сухой и чистой.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

1 пара в упаковке.

## **ПРАВИЛА УХОДА:**

- рекомендуется просушивать изделия после эксплуатации в течении 24 часов вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей;
- по мере загрязнения протирайте кожаные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором;
- по мере загрязнения протирайте текстильные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.



**Обязательно просушите стельки после обработки!**

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

30 дней со дня продажи.

**Нельзя сушить стельки в СВЧ-печи!**

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

## **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:**

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **СРОК ГОДНОСТИ:**

не установлен.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

утилизация с бытовым мусором.

Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделия предназначены для многократного личного использования. Соблюдения мер безопасности не требуется.



Отпускается без рецепта.

Товар является медицинским изделием.

РУ № ФСЗ 2012/12272 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д71176 (с 08.06.2015 г. по 08.06.2018 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию»

**Изготовитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ,  
Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикал Групп»,  
Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск,  
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58,  
ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ,  
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

[www.ortmann.ru](http://www.ortmann.ru)