



medi



Achimed

Achillessehnenbandage
Achilles tendon support
Chevillère pour le talon d'Achille
Vendaje tendón de Aquiles

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató.
Navodila za uporabo. Návod na použitie


medi. I feel better.



1



2

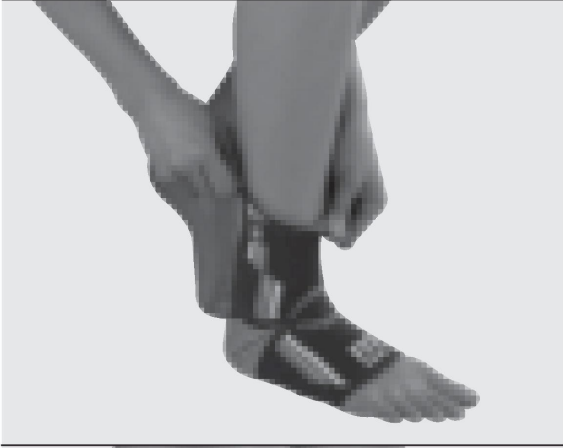

3



4

Achimed

Назначение

Achimed представляет собой бандаж для ахиллова сухожилия. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения ахиллова сухожилия; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Острое и хроническое воспаление ахиллова сухожилия
- Воспаление после травм и операций
- Ахиллодиния
- Ахиллобурсит

Противопоказания

Окклюзии артерий, флебиты, венозные язвы, состояние после тромбоза вен. При варикозной болезни и постоянном отеке нижней конечности следует одновременно с бандажом носить медицинский компрессионный чулок до колена (A-D).

Принцип действия

- Компрессионная ткань и силиконовый вкладыш массируют область сустава, ускоряя заживление.
- Мягкий силиконовый вкладыш защищает ахиллово сухожилие.
- Съёмные подпяточники уменьшают болезненное напряжение ахиллова сухожилия. По мере достижения лечебного эффекта можно (по указанию

врача) иногда вынимать подпяточники, что позволит ахиллову сухожилию адаптироваться к исходному уровню напряжения.

Рекомендации по применению

Максимальный лечебный эффект при использовании Achimed достигается в том случае, когда голеностопный сустав находится в движении. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Рекомендации по надеванию

- Выверните верхнюю часть бандажа наружу до силиконового вкладыша (рис. 1).
- Возьмите бандаж за середину силиконового вкладыша. Натяните бандаж на стопу так, чтобы пятка оказалась в правильном положении (вкладыш должен окружать ахиллово сухожилие) (рис. 2).
- Разверните верхнюю часть бандажа и, по необходимости, подтяните его (рис. 3+4).

Бандаж надет правильно, если шов проходит по середине пятки, а ахиллово сухожилие располагается в вырезе силиконового вкладыша.

Рекомендации по уходу

- Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.
- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при

температуре 30 °С с мягким
моющим средством без
использования ополаскивателя.

- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от
прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, полиэстер, эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных
законодательством, действующим на
территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать
вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего
выздоровления!