



## ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

### СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СТЕЛЕК:

1. Подберите стельки Вашего размера
2. Если в обуви уже вложены стельки, их необходимо удалить перед вставкой ортопедических стелек
3. Удалите защитный бумажный слой с пяточного фиксатора и аккуратно вставьте стельку в обувь
4. Если размер стельки соответствует размеру обуви и, тем не менее, стелька не прилегает до конца, аккуратно подрежьте переднюю часть стельки по форме Вашей обуви
5. Чистку стелек можно производить тряпочкой, намоченной в теплом мыльном растворе или мягкой щеткой. Сушить при комнатной температуре. Не рекомендуется нагревать стельки до температуры выше 40°C, использовать для сушки нагревательные приборы
6. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное положение постепенно, поэтому к стелькам надо привыкнуть
7. Период привыкания к ортопедическим стелькам составляет от 1 до 7 дней

**ВНИМАНИЕ! ЛЮДЯМ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛКИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ!**

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные)
- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием
- несанкционированный ремонт или внесение изменения в конструкцию