

Продукция Push med представляет апробированные врачами и учеными эффективные решения для лечения и предотвращения травм опорно-двигательного аппарата.

Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ PUSH MED ANKLE BRACE АРТИКУЛ: 2.20.1

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Остаточная нестабильность голеностопного сустава умеренной степени (при умеренной нагрузке).
- Лечение острых повреждений латеральных связок голеностопного сустава (альтернатива бинтованию).
- Лечение стабильных переломов лодыжки (Вебера, тип А, с изолированным переломом латеральной лодыжки).
- Послеоперационное лечение травм связок и переломов.
- Бурсит и тендинит, вызванные переломами костей голени в области лодыжек.
- Артроз с нестабильностью.
- Вторичная профилактика повреждений связок голеностопного сустава.
- Ушибы и травмы голеностопного сустава.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ





Перед надеванием ортеза необходимо расстегнуть застежку-«молнию» и все застежки «Велкро».

Правильная последовательность фиксации ремней определяется по увеличению количества символов «*» на застежках «Велкро».

1. Наденьте основу ортеза на стопу, убедившись, что она плотно прилегает к стопе. Расположите стопу под углом 90° относительно голени. Затем закройте застежку-«молнию» и эластичные застежки «Велкро» на передней части ортеза.
2. Зафиксируйте неэластичные ленты крест-накрест вокруг подъема лодыжки. Правильная последовательность наложения лент определяется по увеличению точечных символов «*» на застежках-липучках «Велкро».
3. Эластичные ленты накладываются вокруг стопы в виде «восьмерки». Наложение начните с закрепления фиксатора на пятке. Расположите ленту диагонально вверх подъема в направлении внутренней стороны стопы. Затем протяните ленту под нижней стороной стопы в направлении внешней стороны и диагонально через подъем стопы в направлении внутренней стороны голени.
4. Зафиксируйте эластичную повязку, сделав один оборот ленты вокруг голени.
5. Закрепите фиксатор второй ленты. Расположите ленту диагонально вверх подъема в направлении внешней стороны стопы.
6. Затем протяните ленту под нижней стороной стопы в направлении внутренней стороны и диагонально через подъем стопы в направлении внешней стороны голени. Зафиксируйте эластичную повязку, сделав один оборот ленты вокруг голени.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза Push med Ankle Brace на голеностопный сустав может потребоваться консультация лечащего врача.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push med Ankle Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push med Ankle Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Ankle Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Ankle Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

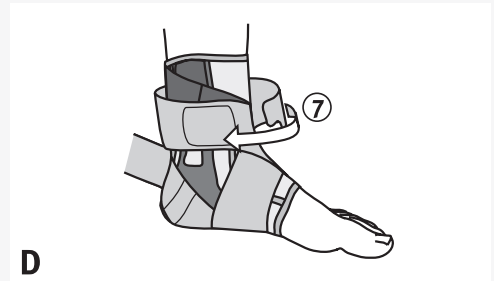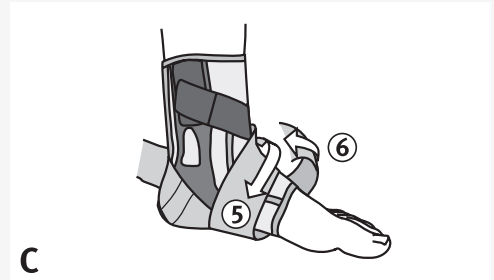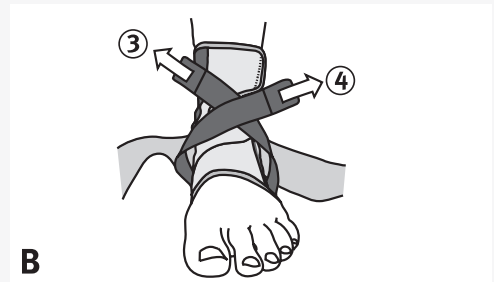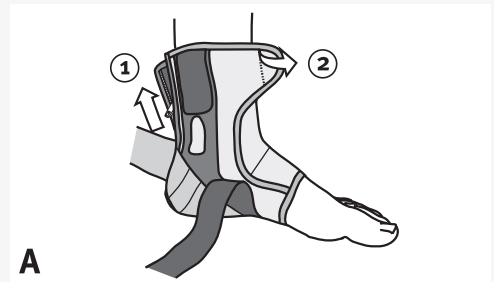

1 2036-20 1 / 3

Made in the EU
Designed in the Netherlands

www.push.eu

The Netherlands
6199 AB Maastricht-Alport
Europalaan 31
Nea International Bv



2.20.1



MED

Ортез на голеностопный сустав
ANKLE BRACE



Инструкция по применению



• РУ

Артикул 2.20.1

Производитель NEA International BV
(NEA Интернешнл БиВи)
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»
Россия,
143405, Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,
127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04876 от 29.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.AЯ46.Д72396
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»



СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Орtez Push med Ankle Brace на голеностопный сустав обеспечивает высокий уровень фиксации и защиты в процессе лечения или для профилактики травм голеностопного сустава. Он может использоваться во многих случаях и состояниях. Комбинация фиксации ортеза посредством застежек «молния» и «Велкро» обеспечивает удобное надевание. Неэластичные ленты используют для задания пределов пронации и супинации, без ограничений для ходьбы. Эластичные повязки со встроенным фиксатором на пятке, в сочетании с функциональной лентой, обеспечивают индивидуально регулируемую компрессию вокруг голеностопного сустава.

Силиконовая аппликация на внутренней стороне ортеза стимулирует проприоцепцию в области голеностопного сустава. Орtez Push med Ankle Brace на голеностопный сустав занимает минимальный объем и его можно носить практически в любой обуви. Смягчающие вставки на ахилловом сухожилии и на подъеме стопы предупреждают натирание. Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля). Орtez Push med Ankle Brace на голеностопный сустав удобен для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


Противопоказаний к использованию ортеза Push med Ankle Brace на голеностопный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Ankle Brace на голеностопный сустав для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в стопе. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность голеностопного сустава: через пятку к подъему стопы (см. рисунок на упаковке). Ортезы Push med Ankle Brace на голеностопный сустав выпускаются в пяти размерах раздельно на правую и левую стороны (см. таблицу размеров на упаковке). Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро» и застежку «молнию». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Чтобы продлить срок службы, после стирки ортез следует просушить.

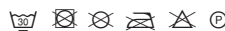

СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3, 4, 5 (левый, правый)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.


УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.


ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.20.1

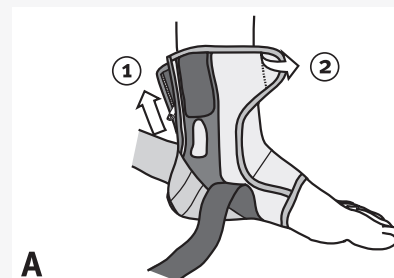


A

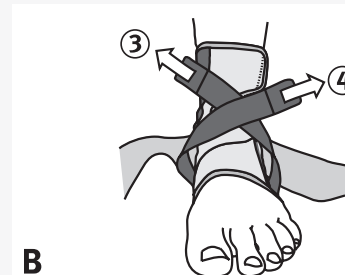

B

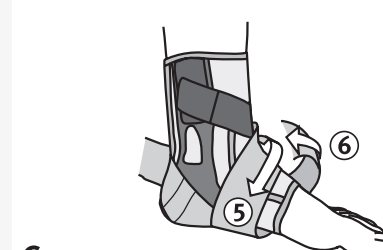


C

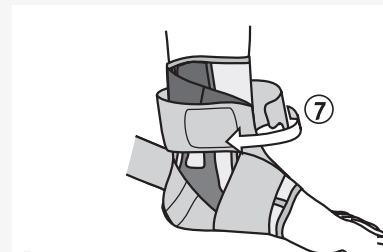

D



E

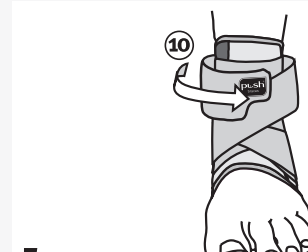

F