

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

LSS-114

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Корсет ортопедический Orlett пояснично-крестцовый полужесткий с металлическими ребрами и дополнительными затяжками, арт. LSS-114, применяется при необходимости сильной фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника, при заболеваниях, после травм и операций, а также для стабилизации связочно-суставного аппарата, уменьшения нагрузки, устранения дисбаланса паравертебральных мышц в поясничном отделе и нормализации положения позвонков при смещениях.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- острый и хронический болевой синдромы в пояснично-крестцовом отделе позвоночника на фоне:
 - выраженного радикулита, корешкового синдрома;
 - остеохондроза поясничного отдела позвоночника;
 - спондилоартрозов и спондилитов в поясничном отделе позвоночника;
 - грыж и протрузий межпозвонковых дисков;
 - смещений позвонков (спондилолистезов);
 - сакроилеитов;
- реабилитация после повреждений тазового кольца;
- реабилитация после травм и операций на поясничном отделе позвоночника;
- функциональная терапия при болях в пояснице и пояснично-крестцовом отделе позвоночника в комплексе с мануальной терапией, массажем, медикаментозными и физиотерапевтическими методами лечения.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- беременность;
- невправимые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии;
- диафрагмальные грыжи;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения корсета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача.

Людам с особо чувствительной кожей следует надевать корсет на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться у врача о возможности дальнейшего применения корсета.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Цифры на рис. 1, 2 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Фиксирующий пояс корсета с застежкой-липучкой «MICRO VELKRO».
2. Нерастяжимая спинка корсета с 4 металлическими ребрами жесткости, изогнутыми промышленным способом.
3. Дополнительные затяжки, по две с каждой стороны.



рис. 1

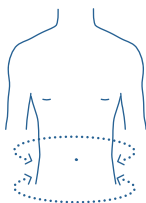


рис. 2

Корсет надевается лежа на спине.

1. При необходимости вынуть ребра жесткости и дополнительно индивидуально от моделировать по фигуре, для обеспечения более плотного прилегания корсета к пояснично-крестцовому отделу и необходимой степени фиксации.
2. Фиксирующий пояс надеть так, чтобы нижний край эластичного пояса в застегнутом состоянии проходил по паховым складкам (рис. 2).
3. Зафиксировать корсет дополнительными затяжками (лентами усиления) (рис. 2).

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для корректного подбора корсета ортопедического Orlett пояснично-крестцового полужесткого с металлическими ребрами и дополнительными затяжками необходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корсет Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер (по объему)	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
XS (только для укороченного)	до 70
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	115-125
XXXL (только для стандартного)	125-140

Размер (по высоте спинки)	Рост, см
укороченный	до 165
стандартный	от 165

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 30 °С.

Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

60% полиэстер, 9% полиамид, 2% хлопок, 2% полиуретановая пена, 7% спандекс, 6% латекс, 1% поливинилхлорид, 13% алюминий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. LSS-114, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-ДЕ.НА38.В.00222/20 (с 17.03.2020 г. по 16.03.2023 г.) выдана ООО «Сервис Плюс».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

