

Бандаж компрессионный на голеностопный сустав Т-8601

Описание:

- изготовлен из бандажной резины
- снабжен контактной лентой — застежка «Велкро»

Функции голеностопного ортеза:

- легкая фиксация и компрессия голеностопного сустава

Показания к применению голеностопного фиксатора:

- частичные повреждения связок голеностопного сустава
- профилактика травм голеностопного сустава при занятиях спортом и интенсивных физических нагрузках
- воспалительные заболевания сустава

Противопоказания к применению бандажа:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава
- злокачественные новообразования в области использования голеностопного ортеза
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлен бандаж на голеностоп

Применять голеностопный бандаж по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению голеностопного бандажа:

- надевается на голеностопный сустав
- степень фиксации регулируется застежкой «Велкро» над лодыжкой

При возникновении вопросов по применению голеностопного бандажа обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа на голеностопный сустав появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегнуть все застежки
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать бандаж на голеностоп
- не тереть и не выжимать изделие
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав голеностопного бандажа:

- латексная нить — 65%
- полиэстер — 35%

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.