

Корректор осанки для подростков и взрослых Т-1778

Описание:

- изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного полотна
- снабжен 4-мя ребрами жесткости и системой динамических лямок для восстановления и сохранения правильной осанки
- незаметен под одеждой, удобен в повседневной жизни, не ограничивает привычный распорядок дня

Функции корректора осанки Тривес:

- формирование и поддержание правильной осанки
- фиксация и разгрузка грудного отдела позвоночника
- нормализация мышечного тонуса

Показания к применению корректора осанки:

- различные варианты нарушения осанки у детей
- кифотическая и сколиотическая деформации позвоночника I-II степени
- ушибы, миозиты и межреберные невралгии в грудном отделе позвоночника

Противопоказания к применению корсета для позвоночника:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- сколиоз III-IV степени
- осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника
- наличие в области применения реклинатора контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

Применять корректор осанки по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- реклинатор одевается на нижнее белье
- приложить изделие к спине
- обернуть лямки вокруг надплечий и зафиксировать их контактной лентой
- одернуть «спинку» изделия и зафиксировать пояс под грудью
- степень фиксации определяется врачом
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом

Рекомендуется применять в комплексе с лечебной физкультурой, массажем, физиотерапевтическим лечением.

При возникновении вопросов по применению корректора осанки обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования корсета для позвоночника появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу за корректором осанки:

- перед стиркой застегнуть все застёжки

- рекомендована ручная стирка при температуре 30°С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать реклинатор
- не тереть и не выжимать изделие
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав корсета для позвоночника:

- полиамид – 40%
- хлопок – 20%
- пенополиуретан – 20%
- эластан – 15%
- полиэстер – 5%
- ребра: пластик

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.