

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Optima

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
под голову, арт. П01

- УСИЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ГОЛОВЫ И ШЕИ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ
- КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА



Изделие используется преимущественно в комплексном лечении. Необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически выгодного положения головы и шейного отдела позвоночника во время сна и дневного отдыха.
- Постепенно развивающееся уменьшение симптомов хронической сосудисто-мозговой недостаточности, преимущественно в вертебро-базиллярном бассейне.
- Постепенно развивающееся уменьшение регионарного болевого синдрома.
- Восстановление нарушенного баланса мышечного тонуса в кранио-цервикальной, цервиго-торакальной зонах и плечевом поясе.
- Улучшение качества ночного и дневного сна и отдыха.

Показания к применению:

Изделие используется преимущественно в лечебно-реабилитационных комплексных программах при:

- головных болях, головокружении, шуме в ушах, неустойчивой походке сосудистого генеза на фоне хронической недостаточности мозгового кровообращения, преимущественно в вертебро-базиллярном бассейне (без острого нарушения мозгового кровообращения в течение последних 3-6 месяцев);
- болевого, мышечно-тонического и нейро-сосудистых синдромах в кранио-цервиго-торакальных сегментах (цервикалгия, цервиго-краниалгия, цервиго-торакалгия, цервиго-брахиалгия и их сочетания) на фоне дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника и суставов плечевого пояса (остеохондроз, спондилез, спондилоартроз, остеоартроз плечевых суставов и их сочетаний);
- сочетании хронической недостаточности мозгового кровообращения с болевыми, мышечно-тоническими и нейро-сосудистыми синдромами.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Начало применения изделия рекомендуется лечащим врачом при:

- длительном, рецидивирующем или нарастающем характере болевых и/или мышечно-тонических проявлений;
 - неэффективном применении аналогичных ортопедических изделий;
 - показаниях к хирургическому вмешательству;
 - после оперативных вмешательств на голову и шею.
- Применять с осторожностью после хирургического вмешательства на позвоночнике (в лобном его отделе) и мягких тканях плечевого пояса.

Состав:

Основы: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.

Чехол: 100% хлопок.

Наволочка: 35% лиоцелл – TENCEL® (поверхность), 65% полиэстер.

Комплектность:

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Дополнительную наволочку можно приобрести отдельно.



Способ применения:

Подушку располагают валиком под шею. Подушка не предназначена для сна на животе.

Подбор размера:

Размер одежды	Размер подушки	
42-46	S	33x50x10 см
более 46	M	33x50x14 см

Рекомендуемое положение для сна на подушке ОПТИМА



НА БОКУ



НА СПИНЕ

Положение головы во время сна и отдыха



с обычной подушкой



с подушкой TRELAX

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

AUTOBACK, арт. П12
CRUISE, арт. П36
OPTIMA, арт. П01
OPTIMA BABY, арт. П03
RESPECTA, арт. П05
RESPECTA BABY, арт. П35
SOLA, арт. П30
SPECTRA, арт. П04
SPECTRA SEAT, арт. П17
AUTOHEAD, арт. П16

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 30°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Не применять сушку в барабане. Утюжка при температуре не более 110°C.

Уход за заготовкой подушки: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проверьте заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

OPTIMA, арт. П01
RESPECTA, арт. П05

Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель. Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитывать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать. Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.

Соблюдение мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителей и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.