

Повязка Дезо. Бандаж фиксирующий на плечевой сустав Т.33.01

- иммобилизация плечевого сустава и верхней конечности после операции и гипсовых повязок
- частичные повреждения сумочно-связочного аппарата ключично-акромиального сочленения, плечевого и локтевого суставов, подвывихи плеча, ушибы верхней конечности
- артрозы, артриты суставов верхней конечности, субакромиальный синдром
- парезы и параличи верхней конечности
- вывихи плечевой кости, в том числе привычные
- реабилитация после переломов лопатки

Функции:

- фиксация верхней конечности в физиологически правильном положении
- разгрузка мышечно-связочного аппарата и суставов верхней конечности

Инструкция по применению:

- предплечье расположить в муфте, как показано на рисунке
- ремни перекидываются через надплечья, перекрещиваются на спине и закрепляются на муфте
- пояс фиксирует пораженную конечность к туловищу
- степень фиксации определяется лечащим врачом

При возникновении вопросов по применению плечевого бандажа обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования повязки Дезо на плечевой сустав появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу и хранению:

- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать бандаж
- не тереть и не выжимать изделие
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав:

- пенополиуретан — 60%
- нейлон — 20%
- полиэстер — 20%

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.