

Продукция Push med представляет апробированные врачами и учеными эффективные решения для лечения и предотвращения травм опорно-двигательного аппарата. Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования. Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию. Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

**ОРТЕЗ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
PUSH MED ELBOW BRACE
АРТИКУЛ: 2.70.2**

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Повреждения связок локтевого сустава.
- Артрозы и артриты локтевого сустава, в т.ч. ревматоидные.
- Период реабилитации после переломов костей в области локтевого сустава.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Перед надеванием ортеза необходимо расстегнуть застежку «молнию» и липучки «Велкро».

1. Наденьте ортез на локтевой сустав. Для этого попеременно натягивайте правый и левый концы боковых локтевых накладок, чтобы ортез надевался на руку симметрично. Ортез надет правильно, если Вы ощущаете выпячивание локтя в отверстии ортеза.
2. Поднимите руку, чтобы добраться до застежки-«молнии» и закрыть ее.
3. Зафиксируйте неэластичную повязку на задней поверхности плеча.
4. С помощью неэластичных лент задайте необходимый предел натяжения. Разгибание локтя регулируется дополнительной фиксацией на руке ленты с застежкой-липучкой «Велкро».

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза Push med Elbow Brace на локтевой сустав может потребоваться консультация лечащего врача.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push med Elbow Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push med Elbow Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Elbow Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Elbow Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ


Ортез Push med Elbow Brace на локтевой сустав обеспечивает последовательное изменение ограничения разгибания локтевого сустава, что предотвращает избыточное растяжение связок. Конструкция ортеза позволяет самостоятельно регулировать ограничение движения. Две жесткие накладки обеспечивают фиксацию и объем сгибания-разгибания в локтевом суставе. Смягчающие вставки на уязвимых участках локтя предупреждают натирание. Анатомический крой, материалы и силиконовая аппликация обеспечивают стабильное положение ортеза на локте при движениях.

Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).

Ортез Push med Elbow Brace удобен для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push med Elbow Brace на локтевой сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Elbow Brace на локтевой сустав для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в предплечье и кисти. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

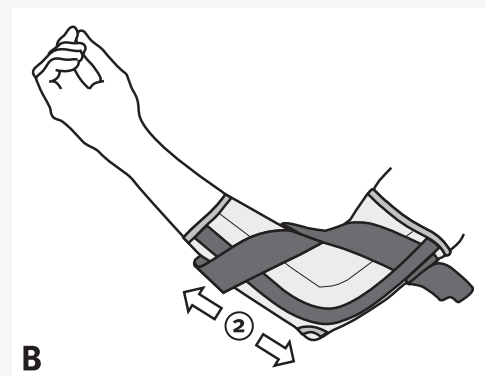

I 2036-70 2 / 3

Made in the EU
Designed in the Netherlands

www.push.eu

The Netherlands
6199 AB Maastricht-Alport
Europalaan 31
Nea International Bv



2.70.2



MED

Ортез на локтевой сустав
ELBOW BRACE



Инструкция по применению



• PY

Артикул 2.70.2

Производитель NEA International BV
(NEA Интернешнл БиВи)
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»
Россия,
143405, Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,
127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04856 от 25.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.АЯ46.Д72395
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»



ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряют окружность локтевого сустава (см. рисунок на упаковке).

Ортез производится в пяти размерах (см. таблицу подборов размера на упаковке).

Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застёжки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Чтобы продлить срок службы, после стирки ортез следует просушить.



СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3, 4, 5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.


УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.


ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.70.2



A

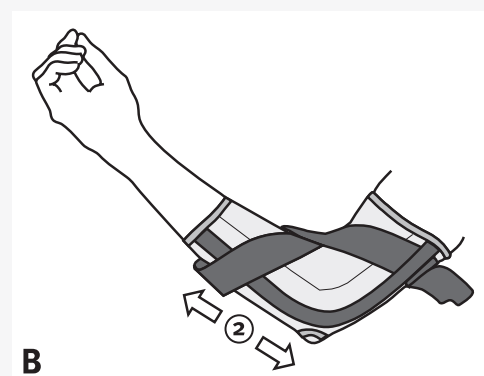

B

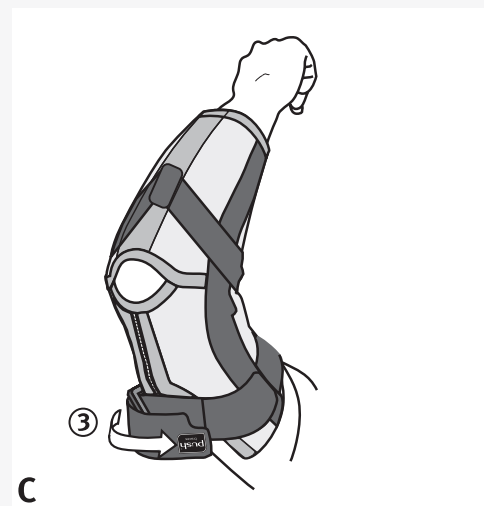

C