

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

- Улучшение качества сна.
- Комфортная поддержка шейного отдела позвоночника и головы для физиологически правильного положения.
- Оптимальная поддержка мышц шеи.
- Расслабление мышц шеи.
- Нормализация тонуса в мышцах шеи и плечевого пояса.
- Нормализация кровообращения головного мозга.

Показания к применению:

- Улучшение качества сна здорового ребенка.
- Нормализация тонуса в мышцах шеи и плечевого пояса.
- Легкая степень кривошеи.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 25x36x6(4,5) см.

Состав:

Основа: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 100% хлопок.

Способ применения:

Подушку размещают во время сна так, чтобы шейный отдел позвоночника располагался на валике подушки. В возрасте 1,5 лет для сна нужно использовать меньший валик, высотой 4,5 см. По мере роста ребёнка необходимо менять валик на более высокий, высотой 6 см.

Комплектность:

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Дополнительную наволочку можно приобрести отдельно.

Prima

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
с эффектом памяти под голову
для детей от 1,5 до 3-х лет, арт. П28

- ПРАВИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЗВОНОЧНИКА
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ТОНУСА В МЫШЦАХ
- УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СНА



Вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти, насыщенный ионами серебра

Рекомендуемое положение для сна на подушке PRIMA



Положение головы во время сна и отдыха



ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

BAMBINI, арт. П32
MIMI, арт. П27
PRIMA, арт. П28
SWEET, арт. П09
CLIN, арт. П31

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Сушка в естественных условиях. Утюжка при температуре 110°C.

Уход за основной подушкой и матрасом: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

BAMBINI, арт. П32
MIMI, арт. П27
PRIMA, арт. П28
SWEET, арт. П09

Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитывать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов.

В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать. Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.

Соблюдения мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, в/я № 58, ООО «НИКАМЕД»-представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.