



medi

protect.Clavicle support

Бандаж ключичный

medi / feel better.

Инструкция по использованию

protect.Clavicle support («ПРОТЕКТ.КЛАВИКУЛ СУППОРТ»)

Бандаж ключичный (protect.Clavicle® support)

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2009/04879

от 18 августа 2009 года, срок действия не ограничен.

Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали бандаж protect.Clavicle support. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

Показания

Все типы переломов ключицы.

Полные и частичные разрывы акромиально-ключичного сочленения.

Принцип действия


Бандаж фиксирует плечи в положении отведения назад, выпрямляя осанку и разгружая ключичную область.

Противопоказания

Обструкция дыхательных путей.

Сдавление нервно-сосудистого пучка.

Инструкция по надеванию

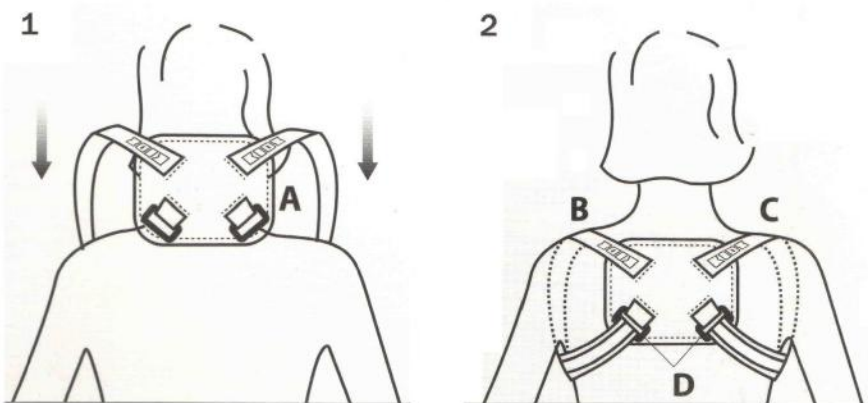

Бандаж для фиксации положения ключицы уже готов к использованию. Не требуются замеры, отрезания, подкладки и завязывание, как при использовании привычных трубчатых повязок. Вы быстро обратите внимание на приятную экономию времени.

1. Наденьте часть А приспособления на плечи (см. рисунок 1) так, чтобы ремни (части В и С) были расположены сверху.
2. Поместите ремни В и С под мышки, проденьте в соответствующие застёжки D, натяните и застегните (см. рисунок 2).

ВНИМАНИЕ! При натягивании ремней плечи пациента должны быть отведены назад.

Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу

Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °C) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.



Состав

Тканевая основа:

полиэстер 82%, эластан 18%

Наполнитель:

полиамид, пенополиэтилен, полиэстер

Ремни и крепления:

полиэстер, полиамид, нейлон

Цвет

Голубой (blue)

Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу:

121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1

Ортезы и бандажи от компании medi для использования в травматологии и ортопедии

protect.Collar soft

Шейный воротник

Размер	Окружность шеи
1 (высота 5 см)	18 – 22 см
2 (высота 6 см)	22 – 28 см
3 (высота 7 см)	28 – 33 см



medi Shoulder sling

Бандаж для верхней конечности иммобилизующий с дополнительным поясом

Размер	Возраст	Версия
1	с 3 - до 8 лет	пр./лев.
2	с 8 - до 12 лет	пр./лев.



Manumed

Шина для лучезапястного сустава с моделируемой пластиной

Размер	Окружность запястья	Версия
1	10 – 11 см	пр./лев.
2	11 – 13 см	пр./лев.
3	13,5 – 14,5 см	пр./лев.
4	более 15 см	пр./лев.



medi Walker boot

Ортез голеностопный жесткий

Размер	Размер обуви
S	18 – 22
M	23 – 25
L	26 – 28
XL	29 – 32



medi arm sling (medi Armschlinge)

Бандаж для верхней конечности поддерживающий

Размер	Возраст
1	с 3 - до 8 лет
2	с 8 - до 12 лет



protect.Clavicle support

Бандаж ключичный

Размер	Возраст
1	с 3 - до 8 лет
2	с 8 - до 12 лет



M.step

Ортез голеностопный с лентно-гелевыми вкладышами

Размер
Универсальный



medi Epico ROMs

Ортез локтевой жесткий регулируемый с шарниром

Размер	Версия
Универсальный	пр./лев.



medi Classic

Шина для коленного сустава

Размер	Длина шины
1	21 см
2	26 см
3	31 см
4	40 см



medi ROM

Ортез коленный регулируемый универсальный с возможностью ограничения амплитуды движения и иммобилизации сустава

Размер	Длина ортеза
S	25 см
L	35 см



Изготовитель:

medi GmbH & Co. KG («МЕДИ ГмбХ энд Ко. КГ») Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany Медикуштрабе 1, 95448 Байройт, Германия www.medi.de

Импортер:

ООО «МЕДИ РУС» 121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1 www.medirus.ru

Импортер уполномочен на принятие претензий и пожеланий от покупателей.

protect.Clavicle support («ПРОТЕКТ.КЛАВИКУЛ СУППОРТ») – бандаж ключичный (см. на наклейке изготовителя на упаковке – Clavicular support).

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2009/04879 от 18 августа 2009 года, срок действия не ограничен.

Подбор размера осуществляется с помощью соответствующей таблицы (см. выше).

Размер: см. на наклейке изготовителя на упаковке – «SIZE I» соответствует «Размер I», «SIZE II» – «Размер II». Цвет: см. на наклейке изготовителя на упаковке – «blue» соответствует «голубой». Основные потребительские свойства, показания, назначение, принцип действия и оказываемый эффект, ограничения (противопоказания) для применения, правила и условия эффективного и безопасного использования, условия хранения, срок годности и гарантийный период, условия утилизации: см. инструкцию по использованию на внутренней стороне упаковки.

