



Инструкция по использованию

medi ROM («МЕДИ РОМ»)

Ортез коленный регулируемый универсальный с возможностью ограничения амплитуды движения и иммобилизации сустава.

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09662 от 21 апреля 2011 года, срок действия не ограничен.

Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали шину medi ROM. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

Показания

Иммобилизация коленного сустава после травм.

Иммобилизация коленного сустава в послеоперационном периоде.

Повреждение коллатеральных и/или крестообразных связок или пластика этих связок.


Принцип действия

Стабилизация коленного сустава во фронтальной плоскости, иммобилизация, контролируемый объем движений.

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по надеванию

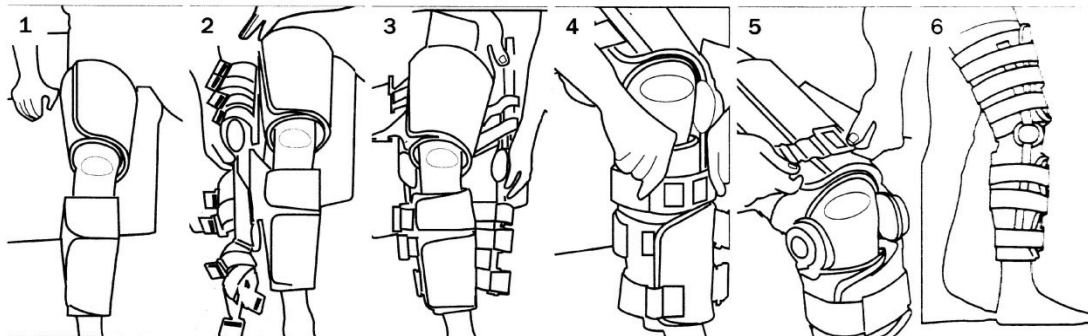

- Расстегните все ремни и отсоедините шины с шарнирными механизмами от мягких подкладок.
- Туго оберните подкладки для бедра и голени вокруг ноги и зафиксируйте застежками-липучками спереди.
- Сначала прикрепите наружную шину с шарнирным механизмом на подкладку. Убедитесь, что шарнирный механизм находится на уровне надколенника и боковой оси коленного сустава.
- Таким же образом прикрепите внутренний шарнирный механизм. Проверьте, чтобы оба шарнирных механизма располагались на одном уровне.
- Вначале застегните верхний ремень на голени, затем – нижний ремень на бедре. Теперь застегните другие ремни, начиная снизу и продвигаясь вверх.
- Для снятия изделия расстегните ремни и подкладки и потяните ортез назад.

Установка угла сгибания/разгибания/иммобилизации

Для смены угла сгибания/разгибания/иммобилизации необходимо выдвинуть предохранитель из паза в крышке шарнира. Расположите образовавшееся окно крышки шарнира напротив одного из штифтов, выньте этот штифт и установите его в нужное положение. При необходимости поверните крышку и поменяйте положение второго штифта. Поверните крышку в исходное положение и вставьте предохранитель в прорезь. Повторите процедуру для второго шарнира.

Углы ограничения разгибания: 0°, 10°, 20°, 30°

Углы ограничения сгибания: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°

ВНИМАНИЕ! Выставленные углы в обоих шарнирах всегда должны быть одинаковыми.

Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу

Перед стиркой отделите металлическую раму от тканевой основы. Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в жидкости изделие прополощите в чистой воде и высушите на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.



Состав

Тканевая основа:

полиэстер 82%, эластан 18%

Наполнитель:

полиамид, пенополиэтилен, полиэстер

Ремни и крепления:

полиэстер, полиамид; нейлон

Рама: алюминий

Шарнир: сталь

Цвет

Голубой (blue)

Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу: 121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1

Ортезы и бандажи от компании medi для использования в травматологии и ортопедии

protect.Collar soft

Шейный воротник

Размер	Окружность шеи
1 (высота 5 см)	18 – 22 см
2 (высота 6 см)	22 – 28 см
3 (высота 7 см)	28 – 33 см



medi Shoulder sling

Бандаж для верхней конечности иммобилизирующий с дополнительным поясом


Размер	Возраст	Версия
1	с 3 - до 8 лет	пр./лев.
2	с 8 - до 12 лет	пр./лев.



Manumed

Шина для лучезапястного сустава с моделируемой пластиной

Размер	Окружность запястья	Версия
1	10 – 11 см	пр./лев.
2	11 – 13 см	пр./лев.
3	13,5 – 14,5 см	пр./лев.
4	более 15 см	пр./лев.

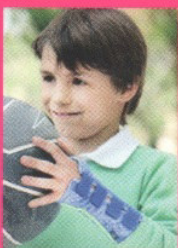

medi Walker boot

Ортез голеностопный жесткий

Размер	Размер обуви
S	18 – 22
M	23 – 25
L	26 – 28
XL	29 – 32



medi arm sling (medi Armschlinge)

Бандаж для верхней конечности поддерживающий

Размер	Возраст
1	с 3 - до 8 лет
2	с 8 - до 12 лет



protect.Clavicle support

Бандаж ключичный

Размер	Возраст
1	с 3 - до 8 лет
2	с 8 - до 12 лет



M.step

Ортез голеностопный с пенно-гелевыми вкладышами

Размер
Универсальный



medi Epico ROMs

Ортез локтевой жесткий регулируемый с шарниром

Размер	Версия
Универсальный	пр./лев.



medi Classic

Шина для коленного сустава

Размер	Длина шины
1	21 см
2	26 см
3	31 см
4	40 см



medi ROM

Ортез коленный регулируемый универсальный с возможностью ограничения амплитуды движения и иммобилизации сустава

Размер	Длина ортеза
S	25 см
L	35 см



protect.Clavicle support («ПРОТЕКТ.КЛАВИКУЛ СУППОРТ») – бандаж ключичный (см. на наклейке изготовителя на упаковке – Clavicular support).

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2009/04879 от 18 августа 2009 года, срок действия не ограничен.

Подбор размера осуществляется с помощью соответствующей таблицы (см. выше).

Размер: см. на наклейке изготовителя на упаковке – «SIZE I» соответствует «Размер I», «SIZE II» – «Размер II». Цвет: см. на наклейке изготовителя на упаковке – «blue» соответствует «голубой». Основные потребительские свойства, показания, назначение, принцип действия и оказываемый эффект, ограничения (противопоказания) для применения, правила и условия эффективного и безопасного использования, условия хранения, срок годности и гарантийный период, условия утилизации: см. инструкцию по использованию на внутренней стороне упаковки.

Изготовитель:

medi GmbH & Co. KG («МЕДИ ГмбХ энд Ко. КГ») Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany
Медикуштраße 1, 95448 Байройт, Германия
www.medi.de

Импортер:

ООО «МЕДИ РУС»
121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1
www.medirus.ru

Импортер уполномочен на принятие претензий и пожеланий от покупателей.

