

## Тутор на голеностопный сустав безнагрузочный ТНО-21

Артикул 2Б.05

Левый / Правый

ЗАО Научно-производственный центр



### Показания к ТНО-21

ДЦП, последствия ОНМК, последствия повреждения спинного мозга, состояние после оперативного и консервативного лечения косолапости, угрожающие формированием эквиноварусной или вальгусной деформации стопы.

### Противопоказания

Выраженные деформации стопы и голеностопного сустава.

### Применение и воздействие

Изделие надевается на хлопчатобумажный чулок. Обеспечивается фиксация стопы в нейтральном или заданном положении коррекции, так как возможна индивидуальная подгонка изделия путем обрезки и термической обработки. Производится профилактика развития «Одеяльных» контрактур, эксиноварусных и вальгусных деформаций стопы.

Срок применения изделия до 20 часов в сутки. Допускается использовать изделие в положении стоя при надетой обуви. Ходьба в изделии не допускается.

### Описание

Изделие изготовлено из ламинированного полиэтилена. Застежки текстильные ворсовые типа «Контакт». Шлевки из полиамида.

Выпускается 11 размеров. В двух вариантах исполнения - левом и правом.

Размер, см	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Санитарно-гигиеническую обработку изделия производить раствором детского мыла.

Срок гарантии 6 месяцев.

ТУ 9396-009-32449888-2001

РУ № ФСР 2010/09692