

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Mimi

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
с эффектом памяти под голову
для детей от 1 до 18 месяцев, арт. П27

- ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ АСИММЕТРИИ ГОЛОВЫ
- ПРАВИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЗВОНОЧНИКА
- УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СНА



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

- Улучшение качества сна.
- Фиксация шейного отдела позвоночника и головы в физиологически правильном положении.
- Оптимальная поддержка мышц шеи.
- Расслабление мышц шеи.
- Нормализация тонуса в мышцах шеи и плечевого пояса.

Показания к применению:

- Улучшение качества сна здорового ребенка.
- Поддержка шейного отдела позвоночника у недоношенных и ослабленных детей.
- Нормализация тонуса в мышцах шеи и плечевого пояса.
- Профилактика развития асимметрии головы при кефалогематоме или врожденной аномалии формирования свода черепа.
- Спастическая кривошея.
- Профилактика скошенности затылка при рахите.

Противопоказания:

Врожденные пороки развития шейного отдела позвоночника.

Способ применения:

Подушку размещают под голову так, чтобы шейный отдел позвоночника располагался на валике подушки, а голова – в углублении подушки.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 23x22x3,5(2) см.

Состав:

Основы: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 100% хлопок.

Комплектность:

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Дополнительную наволочку можно приобрести отдельно.



Эффект памяти

Вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти, насыщенный ионами серебра, с перфорацией

Внутренний съемный чехол – 100% хлопок

Наволочка из 100% натурального хлопка

1 мес. +

Положение головы во время сна и отдыха



ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

BAMBINI, арт. П32
MIMI, арт. П27
PRIMA, арт. П28
SWEET, арт. П09
CLIN, арт. П31

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Сушка в естественных условиях. Утюжка при температуре 110°C.

Уход за основной подушкой и матрасом: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

BAMBINI, арт. П32
MIMI, арт. П27
PRIMA, арт. П28
SWEET, арт. П09

Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель. Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитывать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать. Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.

Соблюдение мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Предензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД»- представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.