

Продукция Push med представляет апробированные врачами и учеными эффективные решения для лечения и предотвращения травм опорно-двигательного аппарата. Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортезов внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

ОРТЕЗ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (8 CM) / (10 CM)

**PUSH MED NECK BRACE 8 CM
АРТИКУЛ: 2.60.1
PUSH MED NECK BRACE 10 CM
АРТИКУЛ: 2.60.2**

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Повышенная подвижность шейных позвонков.
- Состояние после коррекции смещения шейных позвонков.
- Реабилитация после тяжелых травм и операций на шейном отделе позвоночника.
- При длительном напряжении мышц шеи (при работе за компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.).
- Грыжа Шморля в области шейного отдела позвоночника.
- Остеохондроз шейного отдела позвоночника.
- Остеопороз шейного отдела позвоночника с псевдорадикалитным синдромом.
- Дискотатии.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Ортезы на шейный отдел позвоночника Push med Neck Brace оборудованы дополнительной съемной пластиковой шиной. Чтобы установить (или удалить) шину откройте застежку-«молнию», расположенную на ортезах справа.

1. Расположите ортез перед собой строго посередине таким образом, чтобы выемка под подбородок находилась сверху (см. рисунок).
2. Оберните ортез равномерно вокруг шеи и зафиксируйте застежкой «Велкро». Наложённый ортез не должен сдавливать шею и мешать нормальному дыханию.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



- При использовании ортезов Push med Neck Brace на шейный отдел позвоночника может потребоваться консультация лечащего врача.
- Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез Push med Neck Brace.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push med Neck Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push med Neck Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Neck Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Neck Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортезы Push med Neck Brace обеспечивают среднюю фиксацию шейного отдела позвоночника, имеют анатомическую форму и изготовлены из полужесткого вспененного материала. Использование в конструкции ортезов съемной жесткой пластиковой шины позволяет на этапах лечения и реабилитации, по медицинским показаниям, повышать фиксирующие свойства до сильной степени. Специальная форма съемной шины позволяет избегать давления ортеза над областью гортани.

Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).

Ортезы Push care Neck Brace удобны для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитаны на регулярный гигиенический уход (стирку).

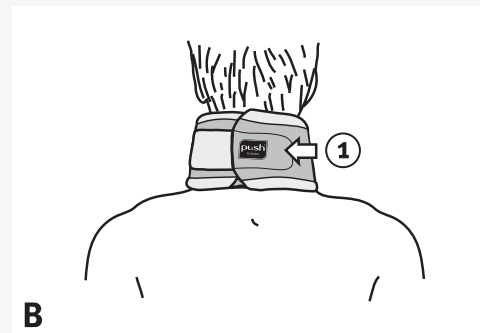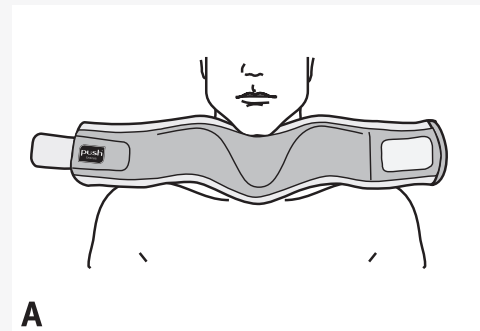

2036-60 1 / 3

Made in the EU
Designed in the Netherlands

www.push.eu


The Netherlands
6199 AB Maastricht-Alport
Europalaan 31
Nea International Bv



2.60.1/2.60.2

MED

Ортез на шейный отдел позвоночника (8 см) / (10 см)
NECK BRACE (8 CM) / (10 CM)

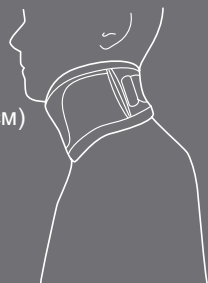

Инструкция по применению



• PY

Артикул 2.60.1/2.60.2

Производитель NEA International BV
(NEA Интернешнл БиВи)
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»
Россия,
143405, Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,
127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04854 от 25.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.АЯ46.Д72394
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»



ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортезов Push med Neck Brace не выявлено.

Избегайте чрезмерно тугого наложения ортезов Push med Neck Brace.

В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

ПОДБОР РАЗМЕРА


Ортезы Push med Neck Brace на шейный отдел позвоночника отличаются по высоте (арт. 2.60.1 - 8 см и арт. 2.60.2 - 10 см) и производятся в двух значениях длины окружностей (27-36 и 36-46 см).

В таблице на упаковке показан размер ортеза, соответствующий длине окружности шеи.

Необходимая высота ортезов подбирается при надевании: голова фиксируется должным образом в том случае, если она находится в нейтральном положении.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой удалите из ортезов пластиковую шину и застегните застёжки «молния» и «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Чтобы продлить срок службы, после стирки ортез следует просушить.

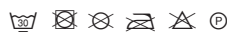

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортезов. Не допускается эксплуатация поврежденных ортезов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.60.1/2.60.2

