



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ОБУВИ С ЗАКРЫТЫМ ЗАДНИКОМ

ORTO Тоу детская

В основе стельки - прочный пружинящий пластиковый каркас. Имеет чашеобразное углубление под пятку с коррекцией вальгусного отклонения позиции пяточного отдела. Форма стельки может быть изменена в зависимости от носочной части обуви.

Назначение:

- Поддерживает своды стопы в анатомически правильном положении, амортизируя нагрузки вместе со стопой.
- Осуществляет коррекцию вальгусного (кнутри-вниз) отклонения позиции пяточного отдела на 6°.
- Оптимизирует ориентацию расположения суставов и позвоночника.
- Снижает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник.
- Уменьшает чувство дискомфорта и усталости при ходьбе.
- Улучшает комфортность обуви.

Показания: лечение вальгусных стоп (наличие изолированного разворота пяточного отдела кнутри-вниз); плоско-вальгусных стоп (вальгусное отклонение пяточного отдела, сочетающееся с уплощением сводов); профилактика формирования Х- и О-образной формы ног, нарушений осанки.

Противопоказания: наличие варусной (отклонение кнаружи-вниз) позиции пяточного отдела стопы, стаптывание наружного края подошвы обуви.

Использование: стельку ORTO Toy рекомендуется носить ежедневно в закрытой стандартной и открытой обуви с высоким жестким задником. Длина стельки должна соответствовать размеру обуви.

Способ ухода за изделием: возможна машинная стирка при 30°C с отжимом при оборотах не более 300 (щадящий режим). Не сушить на нагревательных приборах и в микроволновой печи.

Состав:

Основа: полиэстер, полипропилен.

Верх: полиэстер.

Производитель: Spannrit Schuhkomponenten GmbH, Industriestr. 3, 63801 Kleinostheim, Germany «Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ», Германия, Индустриэштрассе, 3, 63801 Кляйностхайм.

Поставщик: ООО "Малтри" Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, пом 13Н, литера М, тел: (812) 336 - 39 - 99, www.orto.tm

Импортер - лицо, принимающее претензии от покупателей: ООО "Малтри" Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, пом 13Н, литера М, тел: (812) 336 - 39 - 99, www.orto.tm

Зарегистрировано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10945 от 03 ноября 2011 года.

Срок службы: 12 месяцев.

Гарантийный срок: 3 месяца.

Произведено в Германии.

