

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ



**Orlett®**  
вернет радость движения

Medical Line

## Инструкция по применению ортопедических изделий



Корректоры осанки  
TLSO-250(A), TLSO-250(P), TLSO-251(F)



Сделано в Германии

## **Свойства товара (оказываемые эффекты):**

---

Корректоры осанки ортопедические Orlett® с 2-мя металлическими ребрами жесткости, для взрослых, арт. TLSO-250(A), для детей, арт. TLSO-250(P) и корректор осанки Orlett® усиленный, комбинированный для взрослых, арт. TLSO-251(F) позволяют поэтапно корригировать нарушения осанки за счет формирования мышечно-суставного стереотипа правильной осанки, в том числе в детском и подростковом возрасте. Механизм коррекции сочетает горизонтальную и вертикальную реклинацию за счет натяжения нерастяжимых наплечных лямок корректоров. Корректоры осанки обеспечивают разведение ключиц, сведение и опущение лопаток за счет нерастяжимых наплечных лямок и ребер жесткости, расположенных вдоль позвоночника в проекции поперечных отростков позвонков.

### **Дополнительные эффекты:**

- компенсируют дефицит опорности;
- нормализуют тонус мышц проблемных участков спины;
- снижают нагрузки на межпозвонковые диски;
- снижают травматизацию корешков нервов;
- фиксируют и стабилизируют проблемные отделы позвоночника;
- разгружают позвонки и предохраняют их от дальнейшего смещения.

Особенностью конструкции корректора осанки Orlett® усиленного, комбинированного для взрослых, арт. TLSO-251(F) является наличие эластичного пояса, дополнительно обеспечивающего уравнивание тонуса мышц, участвующих в удержании положения тела. Наличие пояса позволяет дополнительно фиксировать и разгружать поясничный отдел позвоночника при наличии болей.

### **Показания к применению:**

---

- нарушения осанки;
- искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I–II степени);
- остеохондроподилопатии (болезни Кальве, Шойермана-May);
- профилактика сутулости при сидячей работе;
- травмы и реабилитация после травм грудного и поясничного отделов позвоночника;
- закрепление достигнутых эффектов после процедур массажа или мануальной терапии;

## **Для моделей Orlett®, арт. TLSO-205(A), TLSO-251(F) дополнительно:**

- профилактика переломов при остеопорозе, опухолях и туберкулезном процессе.

## **Режим и сроки ношения:**

---

Режим и сроки ношения корректора осанки назначает лечащий врач. Перед первым применением необходимо вынуть ребра жесткости и изогнуть их индивидуально (под контролем врача или техника-ортопеда).

## **Рекомендованный режим ношения корректора осанки:**

- начиная с 1-1,5 часов в первый день, постепенно, в течение 2-х недель, доводя до 6-ти часового ношения в день;
- постоянное в течение 4-х - 6-ти часов в день (в зависимости от возраста ребенка) в течение 2-х месяцев;
- постепенно в течение 2-х недель снизить до 1-1,5 часов;
- по прошествии 3-х месяцев обязательно проконсультироваться с лечащим врачом!

## **Противопоказания:**

---

- беременность (для моделей Orlett®, арт. TLSO-250(A), TLSO-251(F));
- диафрагмальные грыжи;
- невралимые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии.

## **Предупреждения:**

- людям, имеющим заболевания кожи перед использованием корректора осанки необходимо проконсультироваться с врачом;
- людям с чувствительной кожей следует надевать корректор осанки на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения корректора осанки.

## **ВНИМАНИЕ!**


Не следует затягивать корректор осанки слишком сильно, во избежание нарушения дыхания.

## **Инструкция по применению корректоров осанки Orlett®, арт. TLSO-250(A), TLSO-250(P) и TLSO-251(F)**

---

### **Конструкция корректоров осанки ортопедических Orlett®, арт. TLSO-250(A), TLSO-250(P) и TLSO-251(F):**


Корректоры осанки ортопедические Orlett®, арт. TLSO-250(A) (рис.1), TLSO-250(P) (рис. 2) и TLSO-251(F) (рис. 3) состоят из следующих элементов (цифры на рис. 1, 2, 3 соответствуют элементам конструкции):

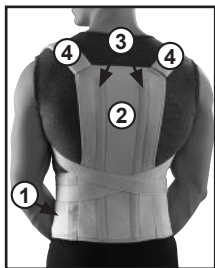

**TLSO-250(A)**  
рис. 1



**TLSO-250(P)**  
рис. 2

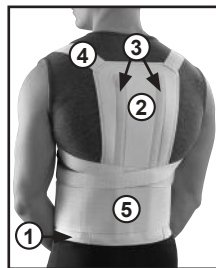

**TLSO-251(F)**  
рис. 3

1. пояс корректора;
2. нерастяжимая спинка;
3. металлические ребра жесткости;
4. наплечные нерастяжимые лямки;
5. дополнительный эластичный пояс (для модели Orlett®, арт. TLSO-251(F)).

## Порядок надевания:

---

Перед использованием корректора осанки, необходимо индивидуально изогнуть ребра жесткости под контролем врача или техника ортопеда. Корректор следует надевать на нижнее белье.

1. Корректор осанки закрепить на животе поясом с застежкой «Велкро» (рис. 4).
2. Расположить ребра жесткости симметрично относительно позвоночного столба. Пропустить лямки корректора под мышками и перекрестить их на спине (рис.5).
3. Расположить мягкие муфты на ляжках корректора так, чтобы они защищали надплечья.
4. Расправить плечи и зафиксировать положение плечевого пояса, застегнув лямки с застежками-липучками «Велкро» на животе (рис. 6).
5. Зафиксировать корректор осанки дополнительным эластичным поясом (для корректора осанки Orlett®, арт. TLSO-251(F)).



рис. 4



рис. 5



рис. 6

## Правила подбора:

---

Для подбора размера корректоров осанки Orlett®, арт. TLSO-250(A), TLSO-250(P), TLSO-251(F) сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеряется окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корректор осанки Orlett® по таблице подбора размеров. При подборе моделей Orlett®, арт. TLSO-250(A), TLSO-251(F) учитывается рост пациента.

**Таблица подбора размеров:**

Корректоры осанки Orlett®, арт. TLSO-250(A), TLSO-251(F)		
Размер	Рост (см)	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
S	150-160	60-75
S1	160-170	60-75
M	160-170	70-85
M1	170-180	70-85
L	170-180	80-95
L1	180-190	80-95
XL	180-190	90-110
XL1	190-200	90-110
XXL	190-200	110-130
XXL1	200-210	110-130

Корректоры осанки Orlett® для детей, арт. TLSO-250(P)		
Размер	Рост (см)	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
S	100-120	45-52
M	120-140	52-58
L	140-160	58-65

## **Правила ухода:**

---

Перед стиркой вынуть металлические ребра жесткости. Для мягкой части предусмотрена ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную сушку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После стирки металлические ребра жесткости вставить на место.



## **Состав изделия:**

---

Корректор осанки Orlett®, арт. TLSO-250(A): 10% полипропилен, 10% полиуретановый поролон, 10% нейлон, 30% полиэстер, 20% хлопок, 20% спандекс.  
Корректор осанки Orlett®, арт. TLSO-250(P): 10% полипропилен, 10% полиуретановый поролон, 10% нейлон, 30% полиэстер, 20% хлопок, 20% спандекс.  
Корректор осанки Orlett®, арт. TLSO-251(F): 10% полипропилен, 10% полиуретановый поролон, 10% нейлон, 30% полиэстер, 20% хлопок, 20% спандекс.

## **Условия хранения:**

---

Корректоры осанки должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **Условия утилизации:**

---

Корректоры осанки утилизировать с бытовым мусором.

## **Срок годности:**

---

Срок годности не установлен.

Возможность использования корректоров осанки дольше, чем предписано курсом лечения должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корректоров осанки без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корректоров осанки. Не допускается эксплуатация поврежденных корректоров осанки.

## **Комплектность**

---

Для корректора осанки Orlett®, арт. TLSO-250(A): ортопедическое изделие арт. TLSO-250(A), инструкция по применению.

Для корректора осанки Orlett®, арт. TLSO-250(P): ортопедическое изделие арт. TLSO-250(P), инструкция по применению.

Для корректора осанки Orlett®, арт. TLSO-251(F): ортопедическое изделие арт. TLSO-251(F), инструкция по применению.

## **Гарантийный срок:**

---

6 месяцев с момента продажи корректора осанки при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В02193 от 14.01.2009 г.

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ. РУ ФС 2006/2376 от 28.12.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.939.П.035066.09.05 от 21.09.2005 г.

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмБХ,  
Германия, 04316, Лейпциг, Херман-Сандер штрассе, 27.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я №60.