



ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО СНА

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологического положения головы и шеи во время сна и отдыха.
- Постепенно развивающееся уменьшение регионарного болевого синдрома.
- Восстановление нарушенного баланса мышечного тонуса в затылочно-шейной и шейно-грудной зонах и плечевом поясе.
- Улучшение качества ночного и дневного сна и отдыха.

Показания к применению:

Комплексная программа профилактики и реабилитации:

- головной боли напряжения (ГБН);
- дискомфорта и мышечного напряжения в шее, нарушающих нормальный сон и/или дневной отдых;
- мышечных спазмов, болей в шее, в том числе с иррадиацией в затылок, грудную клетку и плечевой пояс;
- миофасциальных синдромов;
- фибромиалгий;
- хронической недостаточности мозгового кровообращения, в том числе при уже имеющей место вертебрально-базиллярной недостаточности (начало применения не ранее 3 мес. с момента острого нарушения мозгового кровообращения).

Длительное применение изделия предупреждает прогрессирование дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, суставах плечевого пояса (остеохондроз, спондило- и остеоартроз и др.) и мягких тканях, способствует нормализации кровообращения и особенно микроциркуляции во время сна и отдыха в этих зонах.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. Начало применения изделия должно быть согласовано с лечащим врачом при:

- длительном, рецидивирующем или нарастающем характере болевых и/или мышечно-тонических проявлений;
- неэффективном применении аналогичных ортопедических изделий;
- показаниях к хирургическому вмешательству;
- после оперативных вмешательств на голове и шее.

Применять с осторожностью после хирургического вмешательства на позвоночнике (в любом его отделе) и мягких тканях плечевого пояса.

Состав:

Подушка: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 35% лиоцелл – TENCEL® (поверхность), 65% полиэстер.

Комплектность:

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Дополнительную наволочку можно приобрести отдельно.

Информация об уходе за подушкой, гарантийных обязательствах и разрешительной документации на стр. 42-47

Sola

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
с эффектом памяти под голову, арт. П30

- ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ШЕИ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ И ЭНЕРГИИ
- ПРОФИЛАКТИКА ГОЛОВНОЙ БОЛИ И ОСТЕОХОНДРОЗА

Эффект памяти



Вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти, насыщенный ионами серебра

Способ применения:

Подушку располагают валиком под шею. Подушка не предназначена для сна на животе.


Подбор размера:

Размер одежды	Размер подушки	
42-46	S	35x60x11 см
Более 46	M	35x60x14 см

Рекомендуемое положение для сна на подушке SOLA



НА БОКУ

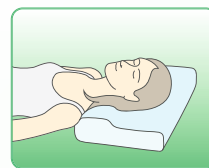

НА СПИНЕ

Положение головы во время сна и отдыха



С ОБЫЧНОЙ ПОДУШКОЙ



С ПОДУШКОЙ **TRELAX®**

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

AUTOBACK, арт. П12
CRUISE, арт. П36
OPTIMA, арт. П01
OPTIMA BABY, арт. П03
RESPECTA, арт. П05
RESPECTA BABY, арт. П35
SOLA, арт. П30
SPECTRA, арт. П04
SPECTRA SEAT, арт. П17
AUTOHEAD, арт. П16

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 30°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Не применять сушку в барабане. Утюжка при температуре не более 110°C.

Уход за заготовкой подушки: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

BAMBINI, арт. П32
MIMI, арт. П27
PRIMA, арт. П28
SWEET, арт. П09
CLIN, арт. П31

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Сушка в естественных условиях. Утюжка при температуре 110°C.

Уход за основной подушек и матрасов: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

BANANA, арт. П33

Уход за чехлом:



Наволочку отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Сушка в естественных условиях. Утюжка при температуре 110°C.

Уход за подушкой в чехле:



Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C. Осторожно отжать руками, не выкручивать. Рекомендуется естественная вертикальная сушка. Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Утюжка запрещена.

BABY COMFORT, арт. П10
NANNY, арт. П29

Уход за подушкой:



Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C. Для предотвращения повреждения материала контактной лентой рекомендуется каждую деталь подушки-конструктора стирать отдельно. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Выжимать руками, не выкручивать. Сушка естественная, горизонтальная, в расправленном виде. При необходимости возможна утюжка с отпариванием при максимальной температуре утюга 110°C. После отпаривания желательно просушить детали подушки-конструктора в течение 1 часа.

DIVA, арт. П08

Уход за изделием:



Подушку можно подвергать машинной стирке при температуре 40°C (деликатный режим). Рекомендуется естественная сушка в вертикальном состоянии. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Утюжка запрещена.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

OPTIMA, арт. П01
OPTIMA BABY, арт. П03
RESPECTA, арт. П05
RESPECTA BABY, арт. П35
SOLA, арт. П30

Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

BAMBINI, арт. П32
MIMI, арт. П27
PRIMA, арт. П28
SWEET, арт. П09

Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

BANANA, арт. П33
DIVA, арт. П08

Гарантийный срок на подушку – 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Во время эксплуатации возможно проминание шариков пенополистирола на 25-30% от исходного объема в местах повышенной нагрузки.

Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи.

BABY COMFORT, арт. П10
CLIN, арт. П31
NANNY, арт. П29

Гарантийный срок: 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации деталей подушки их нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

AUTOBACK, арт. П12
SPECTRA, арт. П04
SPECTRA SEAT, арт. П17

Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать согласно инструкции, не скручивать, не складывать.

В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи.

THERMO CONTROL,
арт. OT140x205
арт. OT172x205
арт. OT200x220

Гарантийный срок на одеяло: 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства одеяла.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке изделия в соответствии с инструкцией.