



ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО СНА

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ И РАБОТАТЬ С КОМФОРТОМ?

Значительную часть нашей жизни мы проводим сидя, будь то работа, путешествия или поездки в автомобиле. При длительном сидении ощущается дискомфорт и напряжение, возникает усталость, боли в спине.

Ортопедические подушки и матрасы TRELAX заботятся о комфорте на работе и дома, в путешествиях и во время вождения автомобиля.

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Расслабляют мышцы шеи, служат для профилактики головной боли, помогают легче перенести длительные поездки.

### Положение головы во время сна и отдыха



БЕЗ подушки



с подушкой **TRELAX**

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Поддерживают шейный отдел и поясницу во время вождения. Снижают утомляемость за рулем при режиме движения "старт-стоп" в городских пробках, а также на долгих дистанциях. Помогают снять мышечное напряжение, превращают любое автомобильное кресло в эргономическое.

### Положение спины при сидении в автокресле



БЕЗ подушки



с подушкой **TRELAX**

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ ДЛЯ РАБОТЫ И ДОМА

Оказывают поддержку позвоночника, снимают напряжение при длительной статической нагрузке, помогают сформировать правильную мышечную память и значительно улучшить осанку.

### Положение спины при сидении на стуле



БЕЗ подушки



с подушкой **TRELAX**

**ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА**

для отдыха и путешествий, арт. П08

- ☉ МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ МЫШЦ ШЕИ
- ☉ РАЗГРУЗКА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
- ☉ УМЕНЬШЕНИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

**Оказываемые эффекты:**

- Фиксация шейного отдела позвоночника и головы в физиологически правильном положении.
- Оптимальная поддержка мышц шеи.
- Расслабление и нормализация тонуса мышц шеи за счет массажного эффекта.
- Уменьшение болевых ощущений при остеохондрозе.

**Показания к применению:**

- Дискомфорт и мышечное напряжение в области шеи и надплечий во время длительного сидения.
- Расслабление шейных мышц при миозите.
- Профилактика нарушений кровообращения головного мозга при длительном сидении в статическом положении (кресло автомобиля, самолета, автобуса и т.д.).
- Профилактика возникновения головных болей при длительном сидении в статическом положении.
- Остеохондроз шейного отдела позвоночника.
- Легкая нестабильность позвонков в шейном отделе.

**Противопоказания:**

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

**Подбор размера:**

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 38x40x8,5 см.

**Цвет:**

Серый, черный.

**Состав:**

Наволочка: 100% полиэстер.  
Наполнитель: 100% пенополистирол.

Наволочка с использованием волокон микрофибры



Шарики пенополистирола для расслабления мышц за счет массажного эффекта

**Комплектность:**

Подушка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

**Способ применения:**

Подушкы размещают в области шеи вырезом вперед так, чтобы при откидывании головы затылочная часть располагалась на валике подушки. Во время использования изделия возможно появление легкого шуршания в связи с особенностью, свойственной полимерному материалу наполнителя.

**Положение головы во время сна и отдыха**



БЕЗ ПОДУШКИ



с подушкой **TRELAX®**

# ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

DIVA, арт. П08

Уход за изделием:



Подушку можно подвергать машинной стирке при температуре 40°C (деликатный режим). Рекомендуется естественная сушка в вертикальном состоянии. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Утюжка запрещена.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

BANANA, арт. П33  
DIVA, арт. П08

**Гарантийный срок на подушку – 1 год со дня продажи.**

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Во время эксплуатации возможно проминание шариков пенополистирола на 25-30% от исходного объема в местах повышенной нагрузки.

**Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи.**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
для всех изделий

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

**СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ:** Вместе с бытовым мусором.

Соблюдения мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.