

Бандаж отводящий для большого пальца стопы Т-01

Артикул: Т-01

Описание:

- состоит из жесткой полиэтиленовой пластины, изогнутой по форме пальца
- снабжен мягкой кожаной пряжкой, фиксирующей первый палец стопы, и застежкой «Велкро»
- выпускается для левой и правой стопы

Принцип действия:

- отведение первого пальца стопы
- профилактика увеличения вальгусной деформации первого пальца стопы

Показания к применению:

- вальгусная деформация первого пальца стопы (Hallux valgus) различной степени тяжести, в том числе с болевым синдромом

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования стопы
- открытые и кровоточащие раны

Инструкция по применению:

- использовать в любое время при отсутствии нагрузки на стопу, а также во время сна;
- надевать на первый палец стопы, располагая жесткую шину между первым и вторым пальцами стопы;
- фиксировать застежкой «Велкро» вокруг наружного края стопы;
- степень натяжения застежки «Велкро» выбирать в зависимости от требуемой коррекции первого пальца стопы

Примечание: При возникновении вопросов по применению бандажа на большой палец ноги обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа отводящего для большого пальца стопы появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Уход за изделием:

- мыть при температуре не более 40° С с использованием моющих средств
- протирать мягкой тканью
- держать вдали от нагревательных приборов
- не подвергать воздействию прямого солнечного света