

## БАНДАЖИ ШЕЙНЫЕ ШВД, ШВВ (ШИНА-ВОРОТНИК ТИПА ШАНЦА)

Мягкоупругий фиксатор шейного отдела позвоночника анатомического профиля фиксируется с помощью застежки типа «велкро» («липучка»).

**НАЗНАЧЕНИЕ:** частичная фиксация и разгрузка позвонков, легкая стабилизация шейного отдела позвоночника, предохранение позвонков от дальнейшего смещения, умеренный согревающий эффект. При длительном применении возможна нормализация тонуса связочного аппарата и мышц шеи.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- легкие травмы шейного отдела позвоночника (ушибы, подвывихи и др.), в том числе последствия родовой травмы;
- легкая нестабильность в шейном отделе позвоночника;
- воспаление мышц шеи;
- комплексное лечение остеохондропатий и аномалий шейного отдела;
- изменение структуры тел позвонков легкой степени выраженности, в том числе остеопороз;
- в позднем периоде реабилитации после иммобилизации гипсовой повязкой или использования головодержателя типа «Филадельфия»;
- остеохондроз шейного отдела позвоночника, в том числе осложненный синдромами позвоночной артерии, передней лестничной мышцы, синдромом плечо-кость, кардиогенным синдромом («шейной стенокардией», плечелопаточным периартрозом, головокружениями, расстройствами зрения, в том числе при глаукоме;
- период реабилитации после черепно-мозговых травм;
- комплексное лечение кривошеи, повреждений кожи шеи, вследствие операций, ожогов, травм, воспалительных процессов;
- профилактика утомляемости при длительных статических нагрузках на мышцы шеи (работа за компьютером, выполнение уроков, поездки в транспорте, длительные путешествия и др.).

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** локальные дерматиты любого происхождения.

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** без ограничений или в соответствии с рекомендациями врача.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:** надевать, предварительно расстегнув застежку. Разместить шину-воротник выемкой под подбородком, зафиксировать сзади с помощью застежки «велкро», допустимо внахлест.

**ВНИМАНИЕ!** Избегать контакта застежки «велкро» с внутренней поверхностью изделия для предотвращения образования затяжек.

**СПОСОБ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ:** перед стиркой закрыть застежку. Стирать в теплой воде (40°C) с использованием мягких моющих средств, не содержащих хлора. Не отжимать. Сушить в разложенном состоянии без использования нагревательных приборов.

**СОСТАВ:** пенополиуретан, чехол – полиэстер.

	таблица подбора изделия по размеру	длина, см	высота, см
ШВД	для детей (до 1 года жизни)	33	4
	для детей (короткий)	36	5,5; 6,5; 7,5
	для детей (длинный)	42	5,5; 6,5; 7,5
ШВВ	для взрослых	53	7,5; 9; 10; 11

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:** № ФСР 2011/10556 от 06 мая 2014г.

ТУ 9396-005-50910339-2006

**Произведено в России.**

**СРОК СЛУЖБЫ:** 12 месяцев.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 6 месяцев с даты продажи.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** специальных условий не требуется.

**ПРОИЗВЕДЕНО:**

-- АПР 2018

