



ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО СНА

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

для детей, арт. П10

- ☉ БЕЗОПАСНАЯ ФИКСАЦИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ НА БОКУ, НА СПИНЕ
- ☉ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА БОКУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО СРЫГИВАНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ
- ☉ ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ОТСУТСТВИИ ПРИСМОТРА



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

- Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении.
- Нормализация тонуса в мышцах.
- Предотвращение развития искривлений позвоночника и асимметрии черепа.
- Безопасное срыгивание после кормления.

Показания к применению:

- Фиксация позвоночника ребенка в физиологически правильном положении при размещении на боку и на спине.
- Предотвращение сползания младенца, переворотов и травм в период бодрствования.
- Обеспечение безопасного срыгивания после кормления в положении на боку.
- Мышечная дистония.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. Не рекомендуется использовать подушку для фиксации ребенка в одном положении более чем на 15 минут.

Способ применения:

Постелите основание-простынку на спальное место поверх основной простыни. Если Вы хотите уложить ребенка на спинку, прикрепите два средних валика по краям простынки к ленте Велкро. Расположите ребенка так, чтобы верхний край простынки находился под его шей, а ручки свободно расположились над валиками. Не прижимайте валики к подмышкам. Валики по бокам должны плотно прилегать к телу ребенка, но не сдавливать его.

Если Вы хотите уложить ребенка на бок, то разместите короткий валик на уровне живота, расположив ручку младенца над ним. Разместите длинный валик со стороны спины младенца, плотно зафиксировав его. Длинный валик обеспечит хорошую, мягкую поддержку спины и всего позвоночника. Короткий валик предотвратит переворачивание ребенка на живот. Данное положение рекомендуется использовать после кормления для безопасного срыгивания.

Старайтесь чаще чередовать положения на правом и левом боку.

Совет! Чтобы ребенок во время сна или лежания был обращен лицом к Вам, при смене позиции боковой фиксации переверните его в кроватке головой в другую сторону.

При нарушении мышечного тонуса шеи, функциональной кривошее в положении ребенка на спине можно фиксировать голову и шею в прямом положении, расположив короткий валик со стороны повышенного мышечного тонуса. При этом валик не должен располагаться под головой и шей.

При возникновении вопросов по использованию подушки-конструктора обратитесь за консультацией к специалисту.



Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 40x44 см.

Состав:

Основание – простынка конструктора – 92% хлопок, 8% нейлон.
Валики: эластичный пенополиуретан.
Чехлы на валики: 100% хлопок.

Комплектность:

Основание – простынка, валики в чехлах: 1 короткий, 2 средних, 1 длинный; полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Рекомендуемое положение для фиксации на подушке BABY COMFORT



НА БОКУ



НА СПИНЕ

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

BABY COMFORT, арт. П10
NANNY, арт. П29

Уход за подушкой:



Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C. Для предотвращения повреждения материала контактной лентой рекомендуется каждую деталь подушки-конструктора стирать отдельно. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Выжимать руками, не выкручивать. Сушка естественная, горизонтальная, в расправленном виде. При необходимости возможна утюжка с отпариванием при максимальной температуре утюга 110°C. После отпаривания желательно просушить детали подушки-конструктора в течение 1 часа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

BABY COMFORT, арт. П10
CLIN, арт. П31
NANNY, арт. П29

Гарантийный срок: 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитывать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации деталей подушки их нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.

Соблюдения мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skkk@nikamed.ru.