



**ORTMANN®**

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

## ВКЛАДЫШИ ОТ НАТОПТЫШЕЙ (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

SolaPro  
**GIRL**

Арт. CZ 0550



### НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- расплывчатость переднего отдела стоп 1 степени;
- натоптыши;
- утомляемость стоп;
- длительная ходьба на высоких каблуках.

### ТИП ОБУВИ:

для всех типов обуви.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

включаются в обувь в области плюснефаланговых суставов на собственной клеевой основе.

### ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- поддерживают передний отдел стопы (поперечный свод стопы);
- снимают нагрузку на дистальные головки плюсневых костей;
- защищают от ударной нагрузки область плюснефаланговых суставов;
- снимают болевой синдром;
- повышают устойчивость при стоянии и ходьбе в босиконках или в колготках в туфельках на каблуках;
- улучшают кровообращение стоп;
- предупреждают усталость стоп;
- улучшают общее самочувствие.

### ПРОТИВПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

необходимость индивидуального ортезирования стопы.

### СОСТАВ:

натуральная кожа, вулканизированный латекс, клеевой слой.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1 пара в упаковке.

### РАЗМЕР:

универсальный.

### ЦВЕТ:

песочный.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

## **УХОД ЗА КОЖАНЫМИ И ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ:**

- рекомендуется просушивать изделия после эксплуатации в течение 24 часов вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей;
- по мере загрязнения протирайте кожаные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором;
- по мере загрязнения протирайте текстильные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.

**Обязательно просушите стельки после обработки!**

## **УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ СИЛИКОНА:**

ежедневно мыть водой в слабом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После мытья необходимо дать высохнуть и прилудить изделие детской присыпкой. Использовать только для наружного применения.



## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

30 дней со дня продажи.

**Нельзя сушить стельки в СВЧ-печи!**

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

## **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:**

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **СРОК ГОДНОСТИ:**

не установлен.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

утилизация с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделия предназначены для многократного личного использования. Соблюдения мер безопасности не требуется. Отпускается без рецепта.



## ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СИЛИКОНА

Товар является медицинским изделием.  
РУ № ФСЗ 2011/09970 от 21.06.2011 г.  
выдано ФС по надзору в сфере  
здравоохранения и социального  
развития, срок действия не ограничен.  
Декларация о соответствии  
№ РОСС DE.МЕ20.ДР1711 (с 27.06.2014 г.  
по 26.06.2017 г.) выдана органом по  
сертификации «Сертиформ ВНИИ-ИМАШ».

**Импортер:** ООО «Орто Мединал Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск,  
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 56, ООО «НИКАМЕД», в России и СНГ,  
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

## ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, ШЕРСТИ И ХЛОПКА

Товар является медицинским изделием.  
РУ № ФСЗ 2012/12272 от 26.06.2014 г. выдано  
Росздравнадзором, срок действия не ограничен.  
Декларация о соответствии  
№ РОСС DE.АЯ46.ДР11176 (с 08.06.2015 г.  
по 08.06.2018 г.) выдана ЗАО «Региональный  
орган по сертификации и тестированию».