

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



 **Orlett**[®]
вернет радость движения

Инструкция по применению ортопедических изделий

Medical Line



Корсет ортопедический
LSS-114



Свойства товара (оказываемые эффекты):

Корсет ортопедический Orlett пояснично-крестцовый полужесткий с металлическими ребрами и дополнительными затяжками применяется при необходимости сильной фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника (Th12-S4), при заболеваниях, после травм и операций, а также для стабилизации связочно-суставного аппарата, уменьшения нагрузки, устранения дисбаланса паравертебральных мышц в поясничном отделе и нормализации положения позвонков при смещениях.

Показания к применению:

- острый и хронический болевой синдромы в нижнегрудном отделе, пояснице и пояснично-крестцовом отделе позвоночника на фоне:
 - выраженного радикулита, корешкового синдрома;
 - остеохондроза поясничного отдела позвоночника;
 - спондилоартрозов и спондилитов в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника;
 - грыж (одиночных, размером более 10 мм., множественных, размером до 10 мм.) и протрузий межпозвонковых дисков;
 - смещений позвонков (спондилолистезы II-III степеней);
 - сакроилеитов;
- средне- и позднесрочная реабилитация после повреждений тазового кольца;
- ранне- и среднесрочная реабилитация после травм и операций на поясничном отделе позвоночника;
- функциональная терапия при болях в пояснице и пояснично-крестцовом отделе позвоночника в комплексе с мануальной терапией, массажем, медикаментозными и физиотерапевтическими методами лечения.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- беременность;
- невправимые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии;
- диафрагмальные грыжи.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача;
- людям с особо чувствительной кожей следует надевать корсет на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться у врача о возможности дальнейшего применения корсета.



Рис. 1

Конструкция корсета:

Цифры на рис. 1,2 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Фиксирующий пояс корсета с застежкой-липучкой «Велкро».
2. Нерастяжимая спинка корсета с 4 металлическими ребрами жесткости, изогнутыми промышленным способом.
3. Дополнительные затяжки, по две с каждой стороны.

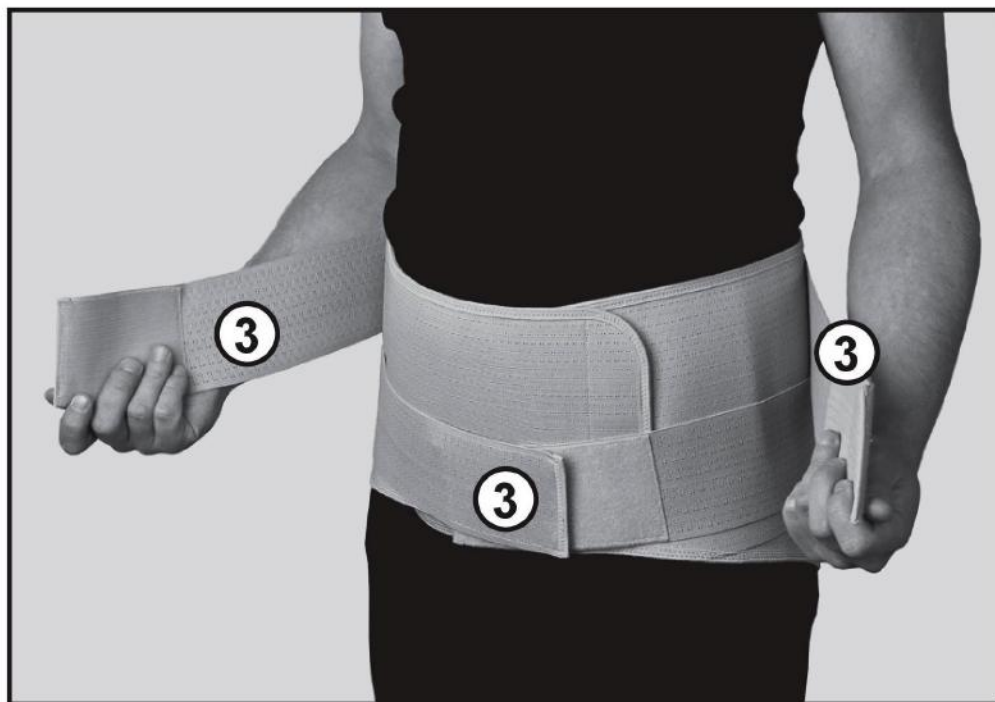


Рис. 2

Порядок надевания:

- Корсет одевается лежа на спине.
1. При необходимости вынуть ребра жесткости и дополнительно индивидуально отмоделировать для придания корсету конгруэнтности пояснично-крестцовому отделу позвоночника, для обеспечения более плотного прилегания и необходимой степени фиксации.
 2. Фиксирующий пояс надеть так, чтобы нижний край эластичного пояса в застегнутом состоянии проходил по паховым складкам (рис. 2).
 3. Зафиксировать корсет дополнительными затяжками (лентами усиления) (рис. 2).

Правила подбора:

Для корректного подбора корсета ортопедического Orlett пояснично-крестцового полужесткого с металлическими ребрами и дополнительными затяжками необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность талии и бедер (рис. 3).

Согласно полученным результатам подобрать корсет Orlett по таблице подбора размеров.

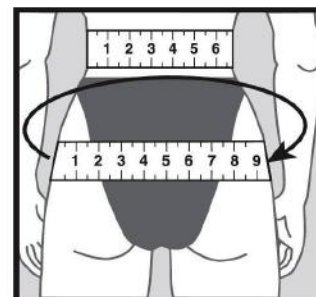


Рис. 3

Таблица подбора размеров:

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый Orlett, арт.: LSS-114

Размер (по объему)	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
XS	до 70
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	более 115

Размер (по высоте спинки)	Рост (см)
Укороченный	до 165
Стандартный	более 165

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Состав изделия:

2% полиуретановый поролон, 5% нейлон, 58% полиэстер, 10% хлопок, 25% спандекс.

Условия хранения:

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.



Условия утилизации:

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. LSS-114, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
РУ № ФСЗ 2011/09549 от 12.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.