

Корректор осанки сильной фиксации Т-1775, Т-1775/1

Описание:

- корректор осанки изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного полотна
- снабжен двумя длинными моделируемыми ребрами жесткости на грудной и поясничный отделы позвоночника и двумя короткими ребрами на поясницу
- имеет систему лямок и стяжек для реклинации и сильной фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника
- ребра жесткости изгибаются врачом индивидуально согласно физиологическим изгибам позвоночника и анатомическим особенностям пациента
- отличие моделей Т-1775 и Т-1775/1:
 - артикул Т-1775 предназначен для людей ростом до 175 см
 - артикул Т-1775/1 предназначен для людей ростом выше 175 см

Функции корректора осанки:

- фиксация грудного и поясничного отделов позвоночника
- формирование и восстановление правильной осанки
- разгрузка грудного и поясничного отделов позвоночника
- нормализация мышечного тонуса

Показания к применению корсета для позвоночника:

- осложненные формы нарушения осанки у детей и взрослых
- кифотическая и сколиотическая деформации позвоночника у детей и взрослых
- реабилитация после травм и операций грудного и поясничного отделов позвоночника
- остеохондроз и остеоартроз груднопоясничного отдела позвоночника
- нарушение структуры тел позвонков при остеопорозе, опухолевом и туберкулезном процессах

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- сколиоз III-IV степени
- осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника
- наличие в области применения реклинатора контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

Применять корректор осанки по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению корсета для позвоночника:

- надеть реклинатор на нижнее белье и закрепить с помощью застежки «Велкро» на животе
- ребра должны располагаться симметрично относительно позвоночного столба
- обернуть лямки вокруг плеч, перекрестить на спине и зафиксировать спереди с помощью застежки-карабина
- отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительной стяжки
- степень фиксации и моделирование ребер жесткости осуществляются врачом
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом

Рекомендуется применять в комплексе с лечебной физкультурой, массажем, физиотерапевтическим лечением.

При возникновении вопросов по применению корсета для позвоночника обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования корсета для осанки появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегнуть все застёжки
- вынуть съёмные ребра жесткости
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать реклинатор
- не тереть и не выжимать корсет для осанки
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить корсет для осанки в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав корректора осанки:

- полиамид – 50%
- полиэстер – 20%
- пенополиуретан – 20%
- эластан – 10%
- ребра: сталь – 1 мм

Гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.