

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



 **Orlett**[®]
вернет радость движения

Инструкция по применению ортопедических изделий

Medical Line



**Бандажи для фиксации в выгодном
физиологичном положении органов
брюшной полости, малого таза**

MS-96, MS-99



Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж Orlett (для беременных до- и послеродовой), арт. MS-96 осуществляет поддержку живота, способствуя нормализации положения плода, снижению риска развития гипертонуса матки, предупреждению излишнего растяжения мышц и кожи живота и появлению «растяжек». Бандаж Orlett, арт. MS-96 снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника во время беременности, уменьшает дискомфорт и боли в спине, сокращает сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов.

Бандаж-корсет Orlett (дородовой для беременных), арт. MS-99 осуществляет поддержку живота, способствуя нормализации положения плода, снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника за счет фиксации поясничной области при помощи ребер жесткости, уменьшает дискомфорт и боли в спине. Способствует снижению риска развития гипертонуса матки, предупреждению излишнего растяжения мышц и кожи и появлению «растяжек» живота, особенно при многоводии, многоплодии.

Показания к применению:

Бандаж Orlett (для беременных до- и послеродовой), арт. MS-96:

- поддержка живота во 2-ой и 3-й триместры беременности;
- профилактика осложнений на фоне беременности (обеспечение нормального положения плода, снижение давления на органы малого таза и др.);
- уменьшение нагрузки на поясничный отдел позвоночника во время и после беременности, предупреждение возникновения болей в спине;
- профилактика гипертонуса матки;
- профилактика перерастяжения мышечного слоя матки и образования стрий (растяжек);
- период восстановления после нормальных родов.

Дополнительные показания к применению:

для пациентов с большим животом и/или неврастимыми грыжами передней брюшной стенки.

Бандаж-корсет Orlett (дородовой для беременных), арт. MS-99:

- поддержка живота во 2-ой и 3-й триместры беременности на фоне заболеваний позвоночника;
- снижение нагрузки на поясничный отдел позвоночника во время беременности;

- уменьшение и предупреждение возникновения болей в спине;
- немедикаментозное лечение радикулитов и люмбаго, возникших во время беременности;
- профилактика осложнений на фоне беременности (обеспечение нормального положения плода, снижение давления на органы малого таза и др.);
- многоводие, многоплодие;
- гипертонус матки;
- профилактика перерастяжения мышц и кожи живота, образования стрий (растяжек).

Дополнительные показания к применению:

для пациентов с большим животом и/или невправимыми грыжами передней брюшной стенки на фоне сопутствующей патологии поясничного отдела позвоночника.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Рекомендованный режим: носят в течение всего дня.

Противопоказания:

Противопоказаний к использованию бандажей не выявлено.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Конструкция бандажей:

Бандажи изготовлены из прочного эластичного медицинского полотна, пропускаемого для воздуха и влаги с высокой износостойкостью.

Ткань биологически инертна, не вызывает аллергических реакций.

На рис. 1 и 2 отмечены следующие элементы конструкций бандажей Orlett для беременных, арт. MS-96 и MS-99:

1. Пояс с застежкой-липучкой «Велкро».
2. Дополнительные затяжки с застежками-липучками «Велкро».
3. Четыре ребра жесткости (в модели Orlett, арт. MS-99).

Порядок надевания:



Рис. 1



Рис. 2

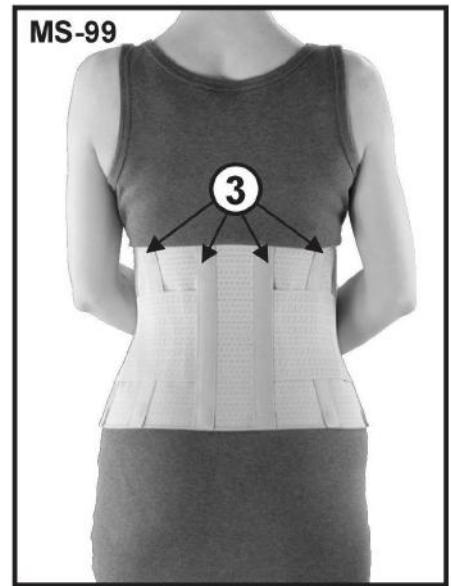


Рис. 3

Бандаж рекомендуется надевать утром, лежа, перед подъемом с постели. Пояс (1) бандажа расположить в лобковой области, под животом, и застегнуть с помощью застежки-липучки «Велкро». Затем бандаж зафиксировать дополнительными лентами натяжения (2).

Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, не утягивая измеряется окружность туловища сзади на уровне поясничного отдела, спереди под животом (см.рис.4).

Согласно полученным результатам подобрать необходимую модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

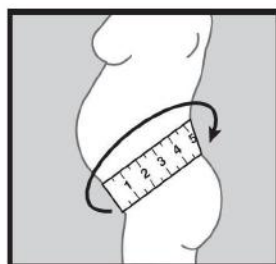


Рис. 4

Таблица подбора размеров:

| Размер | Окружность туловища под животом (см) |
|--------|--------------------------------------|
| S | до 85 |
| M | 85-97 |
| L | 97-105 |
| XL | 105-115 |
| XXL | более 115 |

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Состав изделия:

Бандаж Orlett, арт. MS-96: 4% нейлон, 64% полиэстер, 32% спандекс.

Бандаж Orlett, арт. MS-99: 5% полиуретановый поролон, 10% нейлон, 60% полиэстер, 5% хлопок, 20% спандекс.

Условия хранения:

Бандажи должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандажи утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Бандаж Orlett, арт. MS-96: ортопедическое изделие арт. MS-96, инструкция по применению.

Бандаж Orlett, арт. MS-99: ортопедическое изделие арт. MS-99, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажей при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г.
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.