

Сведения о сертификации

Кресло-коляска для инвалидов мод. Н 009В соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2011/11294
действительно от 28.12.2011 г. Срок действия: не ограничен

Изготовитель: Jiangsu Yuuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd.

Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.

Адрес: Danyang, 212310, Jiangsu, China.

Дистрибьютор: ТМ «Армед»

Тел. в г. Москве: (495) 41-08-11

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов Н 009В – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: www.armed.ru

Кресло-коляска для инвалидов Н 009В

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло-коляска для инвалидов Н 009В предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.

1. Основные технические характеристики

Ширина кресла-коляски, мм	530
Ширина сиденья, мм	440
Диаметр колес, мм	125
Высота сиденья, мм	480
Высота кресла-коляски, мм	960
Грузоподъемность	100
Габаритные размеры, мм	590x330x490
Нетто, кг	15
Брутто, кг	17

1.1. Рама:

Рама коляски складная изготовлена из стальных труб с высококачественным порошковым лакокрасочным покрытием, не подвержена коррозии. Складывается и раскладывается без инструмента.

1.2. Сиденье:

Имеет съемную крышку, выполненную из искусственной кожи. Сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного, легко моющегося пластика.

1.3. Спинка:

Съемная; изготовлена из искусственной кожи, имеет отсек для хранения.

1.4. Подлокотники:

Подлокотники съемные.

1.5. Опоры для ног:

Кресло-коляска комплектуется съемными подножками, регулируемые по высоте и откидными опорами.

1.6. Колеса:

Оснащены не обслуживаемыми цельнолитыми шинами. Два задних колеса имеют индивидуальный тормоз.

2. Комплект поставки

1. Кресло-коляска с санитарным оснащением _____ 1 шт.
2. Судно с крышкой _____ 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации _____ 1 шт.

4. Набор ключей для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья _____ 1 шт.

3. Указание мер безопасности

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

При пересадке из инвалидного кресла-коляски убедитесь, что колеса стоят на тормозе.

Не следует превышать допустимую весовую нагрузку на изделие.

Следует предохранять поверхности деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте кресло-туалет длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

4. Обслуживание и уход при эксплуатации:

Изделие следует протирать от влаги каждый раз после использования. Рекомендуется мыть не реже раза в месяц. При этом пластмассовые части чистятся обычными моющими средствами, а стальные детали нужно обрабатывать 0,5-1% раствором хлорамина или же теплой водой.

Не используйте растворяющие вещества, такие как ацетон. Берегите поверхность от механических повреждений острыми или твердыми предметами.