

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ



Инструкция по применению ортопедических изделий

Medical Line



Ортезы и бандажи малых размеров

Ортез на коленный сустав DKN-203(P)

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Ортез Orlett на коленный сустав обеспечивает легкую степень фиксации и равномерную компрессию, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к коленному суставу.

Бандаж усилен спиральными ребрами жесткости, которые уменьшают ударные нагрузки на сустав при ходьбе.

Показания к применению:

- болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях коленного сустава (артрозах и остеоартрозах);
- реабилитация после травм, ушибов, растяжений связок коленного сустава;
- профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний коленного сустава (артритов, тендинитов, тендовагинитов);
- профилактика травм при занятиях спортом, производственных нагрузках на сустав.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Для профилактики травм и заболеваний суставов рекомендованный режим: при нагрузках на сустав (спортивных, производственных).

Противопоказания:

- острые гнойные воспалительные заболевания;
- индивидуальная непереносимость материалов.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Заболевания кожи (в области применения ортеза).

При возникновении физического дискомфорта, раздражения следует немедленно проконсультироваться с лечащим врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

Конструкция ортеза:

Ортез Orlett на коленный сустав, арт. DKN-203(P) выполнен из инновационного материала, который обеспечивает активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность ортеза и обладает всеми достоинствами изделий из натуральных материалов. Не вызывает аллергии и раздражения кожи. Бандаж усилен боковыми спиральными ребрами жесткости. Конструкции ортеза позволяет удалять спиральные ребра жесткости для ослабления фиксации.

Надевание ортеза:

Удерживая за боковые спиральные ребра жёсткости надеть изделие на область коленного сустава так, чтобы боковые ребра жёсткости располагались симметрично по бокам от коленного сустава.

Способ подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность середины коленного сустава (рис. 13).

Согласно полученным результатам подобрать ортез по таблице подбора размеров.

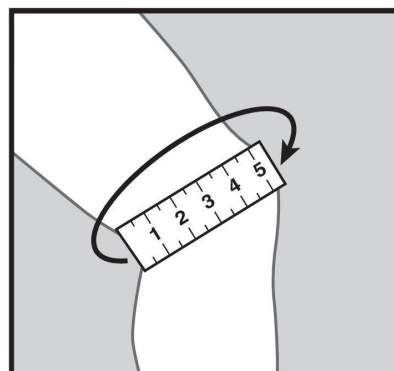


рис. 13

Таблица подбора размеров:

| Ортез на коленный сустав Orlett, арт. DKN-203(P) | |
|--|--|
| Размер | Окружность середины коленного сустава (см) |
| S | 20-22 |
| M | 23-25 |
| L | 26-29 |
| XL | 30-33 |
| XXL | 34-39 |

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Порядок надевания:

Ортез Orlett, арт. DKN-203(P) надевается непосредственно на коленный сустав (рис. 14).

1. Текстильный компонент изделия.
2. Карманы рёбер жёсткости.
3. Боковые спиральные рёбра жёсткости.

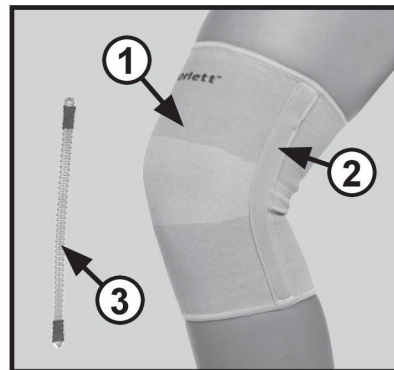


рис. 14

Состав изделия:

23% полиэстер, 21% хлопок, 17% латекс, 11% эластан, 28% сталь.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. DKN-203(P), инструкция по применению.

Правила ухода за бандажами и ортезами:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



Условия хранения:

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не ограничен.

Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи изделия при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01699 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИНМАШ».

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01706 (с 27.06.2014 г. по 26.06.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИНМАШ».

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01697 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИНМАШ».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127220, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Претензии принимает представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.