



ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО СНА

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА**

с отверстием на сиденье, арт. П06

- ☉ ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ РОДОВ И ОПЕРАЦИЙ НА ПРОМЕЖНОСТИ
- ☉ КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ТРАВМ ТАЗА И КОПЧИКА
- ☉ КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

Изделие используется на этапе восстановительного лечения. Необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

Равномерно распределяет нагрузку на таз и бедра, оставляя интактной область промежности.

Показания к применению:

Как вспомогательное средство при:

- вывихах, переломах и других травмах копчика;
- травмах седалищных бугров;
- в период реабилитации после травм таза, повлекших нарушение целостности тазового кольца;
- заболеваниях и травмах промежности, прямой кишки и малого таза;
- после оперативного лечения геморроидальных узлов;
- после эпизиотомии в послеродовом периоде;
- профилактике пролежней в области седалищных бугров и задней поверхности бедра у длительно сидячих пациентов (инвалиды-колясочники).

Противопоказания:

Выпадение и угроза выпадения органов малого таза, в том числе матки, влагалища и прямой кишки.

Не рекомендуется использовать подушку при вождении автомобиля.

Способ применения:

Подушка используется при сидении на жестких или полужестких поверхностях.

Подушку размещают на сиденье так, чтобы при посадке промежность и копчик располагались в отверстии подушки, а седалищные бугры опирались на валик.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 43x47x9 см.

Состав:

Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.


Наволочка: 100% полиэстер Bielastic.

Комплектность:

Подушка, съемная наволочка, сумка из ПВХ, инструкция по применению.

Наволочка из водоотталкивающего материала Bielastic

Высокоэластичный пенополиуретан, насыщенный ионами серебра

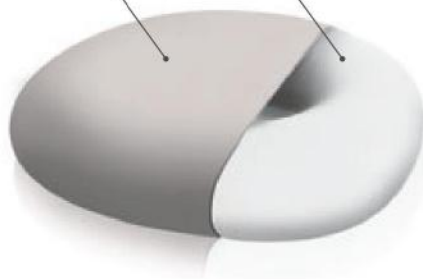

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

MEDICA, арт. П06

Уход за наволочкой:



Наволочку, отдельно от подушки можно подвергать машинной стирке при температуре 95°C. Автоклавирование при температуре 130°C. Допускается машинная сушка при температуре до 120°C. Сушка в камере при температуре до 105°C (не более 1 мин.). Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Утюжка запрещена.

Уход за заготовкой подушки: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и провертите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

MEDICA, арт. П06

Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Гарантийные условия распространяются в случае использования подушки пациентами весом не более 120 кг.

Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и хранении продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.

Соблюдения мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Предупреждения направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.