

Лучезапястный бандаж с хлопком Т-8302

Описание:

- изготовлен из трикотажного материала, содержащего 90% хлопка
- не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи
- хорошо отводит влагу с поверхности кожи
- подходит для левой и правой руки

Функции фиксатора запястья:

- легкая фиксация и компрессия лучезапястного сустава

Показания к применению:

- частичные повреждения связок и ушибы лучезапястного сустава
- профилактика травм лучезапястного сустава при занятиях спортом и интенсивных физических нагрузках
- в комплексном лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний лучезапястного сустава

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава
- злокачественные новообразования в области использования бандажа
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

Применять фиксатор запястья по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- надеть петлю на первый палец кисти
- обернуть бандаж по тыльной стороне ладони и зафиксировать на лучезапястном суставе с помощью застежки «Велкро»
- степень фиксации и длительность ношения лучезапястного бандажа определяются врачом

При возникновении вопросов по применению лучезапястного бандажа обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования лучезапястного бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать бандаж
- не тереть и не выжимать фиксатор запястья
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить фиксатор запястья в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав фиксатора запястья:

- хлопок — 90%
- эластан — 10%

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.