



**ORTMANN®**

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ДОКТОР ВАШИХ НОГ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## **ORTMANN – ДОКТОР ВАШИХ НОГ!**

Предлагает Вам комплексные профессиональные решения проблем стопы. ORTMANN – немецкий ортопедический бренд, специализирующийся в области лечения и профилактики заболеваний стопы.

ORTMANN представляет широкий спектр моделей ортопедической обуви и стелек для взрослых и детей, а также ортопедические корректирующие приспособления. Изделия ORTMANN идеально сочетаются друг с другом и могут применяться при комплексной терапии.

ORTMANN предлагает продукцию для всех поколений: с первых шагов до пожилого возраста. ORTMANN это бренд для всей семьи.

# SolaPro ELEGANT

БЕСКАРКАСНЫЕ  
СТЕЛКИ

Арт. AZ 0112

## НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- продольное и комбинированное плоскостопие III-IV степени, в том числе фиксированное;
- артрозы;
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
- избыточный вес;
- варикозная болезнь;
- отеочный синдром;
- беременность.

## ТИП ОБУВИ:

универсальные кожаные стельки для всех типов закрытой обуви.

## ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- мягко и бережно поддерживают поперечный и продольные своды стопы;
- перераспределяют нагрузку по всей площади подошвы стопы;
- снижают нагрузку на дистальные головки плюсневых костей;
- снижают ударную нагрузку;
- снижают болевой синдром;
- повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
- улучшают кровообращение стоп;
- предупреждают усталость стоп;
- уменьшают нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
- уменьшают развитие бактерий и грибов;
- устраняют запах в обуви;
- улучшают общее самочувствие.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

необходимость индивидуального ортезирования стопы.

## СОСТАВ:

натуральная кожа, вспененный полимер, активированный уголь, пенополиуретан.

## РАЗМЕР:

35-46.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Ортопедические стельки ORTMANN рекомендуется носить в повседневной и спортивной обуви. Режим ношения – ежедневно или по назначению специалиста. Длина и ширина стельки должна соответствовать размеру стопы и плотно прилегать к внутренней части обуви.

Некоторые модели стелек и полустелек могут комплектоваться отдельными клеевыми фиксаторами в индивидуальной упаковке для самостоятельного наклеивания на подошвенную сторону стелек в области пяточного амортизатора. Для максимально надежного крепления клеевого фиксатора поверхность в месте контакта должна быть совершенно сухой и чистой.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

1 пара в упаковке.

## **ПРАВИЛА УХОДА:**

- рекомендуется просушивать изделия после эксплуатации в течении 24 часов вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей;
- по мере загрязнения протирайте кожаные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором;
- по мере загрязнения протирайте текстильные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.



**Обязательно просушите стельки после обработки!**

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

30 дней со дня продажи.

**Нельзя сушить стельки в СВЧ-печи!**

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:**

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

не установлен.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

утилизация с бытовым мусором.

Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделия предназначены для многократного личного использования. Соблюдения мер безопасности не требуется.



Отпускается без рецепта.

Товар является медицинским изделием.

РУ № ФСЗ 2012/12272 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д71176 (с 08.06.2015 г. по 08.06.2018 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию»

**Изготовитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ,  
Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикал Групп»,  
Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск,  
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58,  
ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ,  
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

[www.ortmann.ru](http://www.ortmann.ru)