

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Respecta Baby

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
с эффектом памяти под голову
для детей от 3-х лет, арт. П35

- ПРАВИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЗВОНОЧНИКА
- ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
- УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СНА



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

- Улучшение качества сна.
- Фиксация шейного отдела позвоночника и головы в физиологически правильном положении.
- Оптимальная поддержка мышц шеи.
- Расслабление мышц шеи.
- Нормализация тонуса в мышцах шеи и плечевого пояса.
- Нормализация кровообращения головного мозга.

Показания к применению:

- Нормализация тонуса в мышцах шеи и плечевого пояса.
- Профилактика головных болей напряжения.
- Профилактика развития остеохондроза шейного отдела позвоночника.
- Профилактика нарушения осанки.
- Расслабление шейных мышц при мигрени.
- Улучшение кровоснабжения головного мозга при вертебро-базиллярной недостаточности.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 27x44x8(6) см.

Состав:

Основа: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 35% лиоцелл – TENCEL® (поверхность), 65% полиэстер.

Способ применения:

Подушку располагают валиком под шею. В возрасте 3-х лет для сна нужно использовать меньший валик, высотой 6 см. По мере роста ребенка необходимо менять валик на более высокий – высотой 8 см.

Комплектность:

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Дополнительную наволочку можно приобрести отдельно.



36+
мес.

Рекомендуемое положение для сна на подушке RESPECTA BABY



Положение головы во время сна и отдыха



ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

AUTOBACK, арт. П12
CRUISE, арт. П36
OPTIMA, арт. П01
OPTIMA BABY, арт. П03
RESPECTA, арт. П05
RESPECTA BABY, арт. П35
SOLA, арт. П30
SPECTRA, арт. П04
SPECTRA SEAT, арт. П17
AUTOHEAD, арт. П16

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 30°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Не применять сушку в барабане. Утюжка при температуре не более 110°C.

Уход за заготовкой подушки: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

RESPECTA BABY, арт. П35

Гарантийный срок на подушку: 1 год со дня продажи.
Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.
В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.
Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитывать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов.
В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.
Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.
Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.
Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.
Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.
Соблюдение мер безопасности не требуется.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.
Срок годности не установлен.
Отпускается без рецепта.
Изделие предназначено для многократного личного использования.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: sikk@nikamed.ru.