



## ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ОБУВИ С ЗАКРЫТЫМ ЗАДНИКОМ

---

### ORTO Fun Tech детская

*Стельки разработаны на основании данных обследования 5700 детей, проведенного в 2003-2007 гг. в Санкт-Петербурге.*

В основе стельки - упругий пластичный полимерный каркас с чашеобразным углублением под пятку, отверстием под пяточным бугром; высокие боковые бортики продлены до основания пальцев (зоны пучков); смягчение по всей поверхности выполнено из полимера Metopur® с эффектом памяти формы стопы. Стелечное покрытие износостойчивое, абсорбирующее, прочноокрашенное.

Носочная часть стельки имеет классическую форму, что соответствует наиболее часто встречающемуся фасону выпускаемой обуви, при необходимости может быть легко изменена в зависимости от носочной части обуви.

В комплект стелек входят два полимерных уголка, каждый из которых можно приклеить к середине стельки для усиления жесткости конструкции под средним отделом стопы при вальгусной деформации.

#### **Назначение:**

- Поддержание продольных сводов и среднего отдела стопы в анатомически правильном положении.
- Нормализация биомеханики ходьбы за счет оптимального распределения нагрузки под подошвенной поверхностью стопы.

#### **Показания к применению:**

- Лечение нефиксированных форм плоскостопия (в том числе плоско-вальгусных стоп) в сочетании с вальгусом или варусом заднего и/или среднего отдела стопы.

- Комплексное лечение X- и O-образной формы ног, нарушений осанки у детей.
- Сохранение достигнутого эффект коррекции анатомических соотношений стопы на завершающих этапах лечения плоско-вальгусных стоп у детей.

**Противопоказания:** не выявлены.

**Использование:** стельку ORTO Fun Tech рекомендуется носить ежедневно в закрытой стандартной и открытой обуви с высоким жестким задником. Длина стельки должна соответствовать размеру обуви.

**Способ ухода за изделием:** обрабатывать стельку необходимо теплой водой и мягкими пеномоющими средствами с помощью губки или мягкой щетки. Возможна машинная стирка при 30°C с отжимом - при оборотах не более 300 (щадящий режим). Не сушить на нагревательных приборах и в микроволновой печи.

**Состав:** Основа: полиуретан Memopur<sup>®</sup>, SEBS.

Покрытие: полиэстер - 100%.

**Производитель:** Spannrit Schuhkomponenten GmbH, Industriestr. 3, 63801 Kleinostheim, Germany «Шпаннрит Шухкомпонентен ГмБХ», Германия, Индустриэштрассе, 3, 63801 Кляйностхайм.

**Поставщик:** ООО "Малтри" Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, пом. 13Н, литера М, тел: (812) 336 - 39 - 99, [www.orto.tm](http://www.orto.tm). **Импортер - лицо,**

**принимающее претензии от покупателей:** ООО "Малтри" Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, пом 13Н, литера М, тел: (812) 336 - 39 - 99, [www.orto.tm](http://www.orto.tm).

Зарегистрировано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Регистрационное удостоверение. № ФСЗ 2011/10945 от 03 ноября 2011 года.

**Срок службы:** 12 месяцев от даты продажи.

**Условия хранения:** специальных условий не требуется.

Гарантийный срок: 3 месяца.

Произведено в Германии.

**Произведено:**

