

Бандаж на лучезапястный сустав T.36.02 Trives

- изготовлен из трикотажного материала, содержащего 90% хлопка
- не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи
- хорошо отводит влагу с поверхности кожи
- подходит для левой и правой руки

Функции:

- легкая фиксация и компрессия лучезапястного сустава

Инструкция по применению:

- надеть петлю на первый палец кисти
- обернуть бандаж по тыльной стороне ладони и зафиксировать на лучезапястном суставе с помощью застежки «Велкро»
- степень фиксации и длительность ношения лучезапястного бандажа определяются врачом

При возникновении вопросов по применению лучезапястного бандажа обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования лучезапястного бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу и хранению:

- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать бандаж
- не тереть и не выжимать фиксатор запястья
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить фиксатор запястья в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав:

- хлопок — 90%
- эластан — 10%

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.