

# Как использовать Cosmopor® E?



1. Вскройте индивидуальную упаковку и извлеките повязку Cosmopor® E.
2. Снимайте одну половину защитной плетки с повязки
3. Наложите впитывающую подушечку повязки на рану. Аккуратно прижмите клеящий слой повязки к коже, закрепив половину повязки.
4. Полностью снимите вторую часть защитной пленки и осторожно прижмите края повязки к коже.
5. Подушечка при этом должна полностью покрыть рану. Смена повязки происходит в индивидуальном режиме, но не реже, чем один раз в три дня.